



EQUIPOS INTRAFIX® - PÔSTER DE MANUSEIO


Recomendação para manuseio dos Equipos Intrafix® Primeline e Intrafix® Safeset em frascos semirrígidos/bolsas

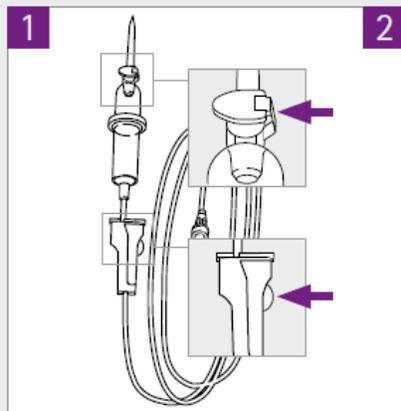


Tire o equipo da embalagem e verifique se o **respiro está fechado** e a **pinça rolete está aberta**.

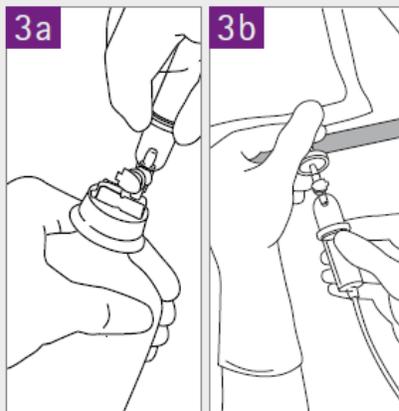


Conecte no frasco semirrígido ou bolsa.

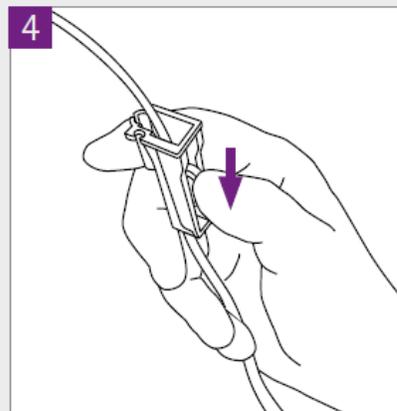


Fechete a pinça rolete

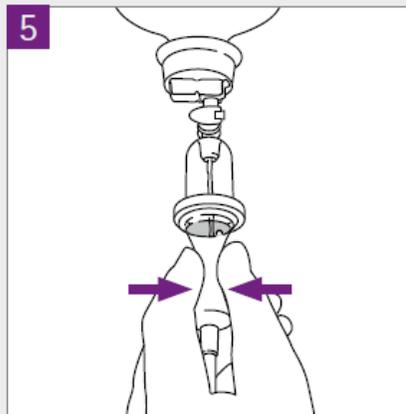

Vire o sistema IV de cabeça para baixo. **Aperte a câmara de gotejamento preenchendo** de fluido até o anel da câmara de gotejamento.

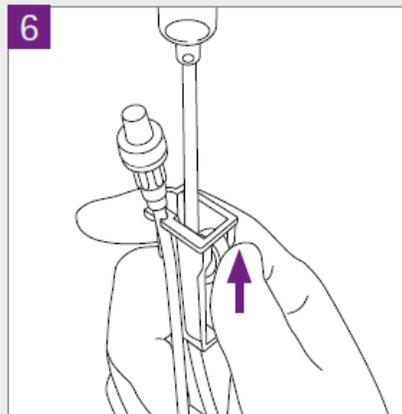

Abra a pinça rolete. Preencha a linha até o fim sem tirar a tampa PrimeStop. Depois feche a pinça novamente.

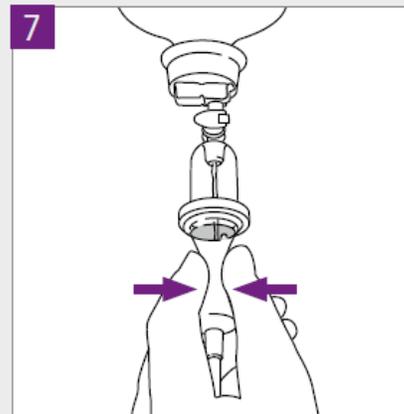

Aperte a câmara de gotejamento outra vez. Remova a tampa e conecte ao acesso do paciente.

B. Braun Brasil | Hospital Care
Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000 | São Gonçalo | RJ | Brasil
S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br



Família de Equipos para Infusão Gravitacional de Soluções Parenterais e medicações - Registro ANVISA nº: 80136990540
Equipos com Válvula Needle-Free - Registro ANVISA nº.: 80136990667

Siga a B. Braun nas Redes Sociais:

[facebook](#) [YouTube](#) [twitter](#)
/bbraunbrasil | /bbraunbrasil | @bbraunbrasil