


FICHA TÉCNICA – CONTIPLEX® C

CONJUNTO PARA BLOQUEIO CONTÍNUO DE NERVOS PERIFÉRICOS

Conjunto para bloqueio contínuo de nervos periféricos guiado por ultrassom e neuroestimulação com tecnologia de cateter sobre agulha, composto por: cateter sonovisível com gauge G19, 188mm de comprimento, marcações a cada 1 cm, com ponta aberta; agulha de punção de fino calibre, G25 bisel 15° com cabo eletrodo para neuroestimulação; clip C-Grip para auxílio no posicionamento do cateter e agulha em único passo; filtro Perifix 0,2µm em poliamida para retenção de partículas, bactérias e endotoxinas; adesivo Pinpad para fixação do filtro; tubo extensor e etiqueta de identificação.

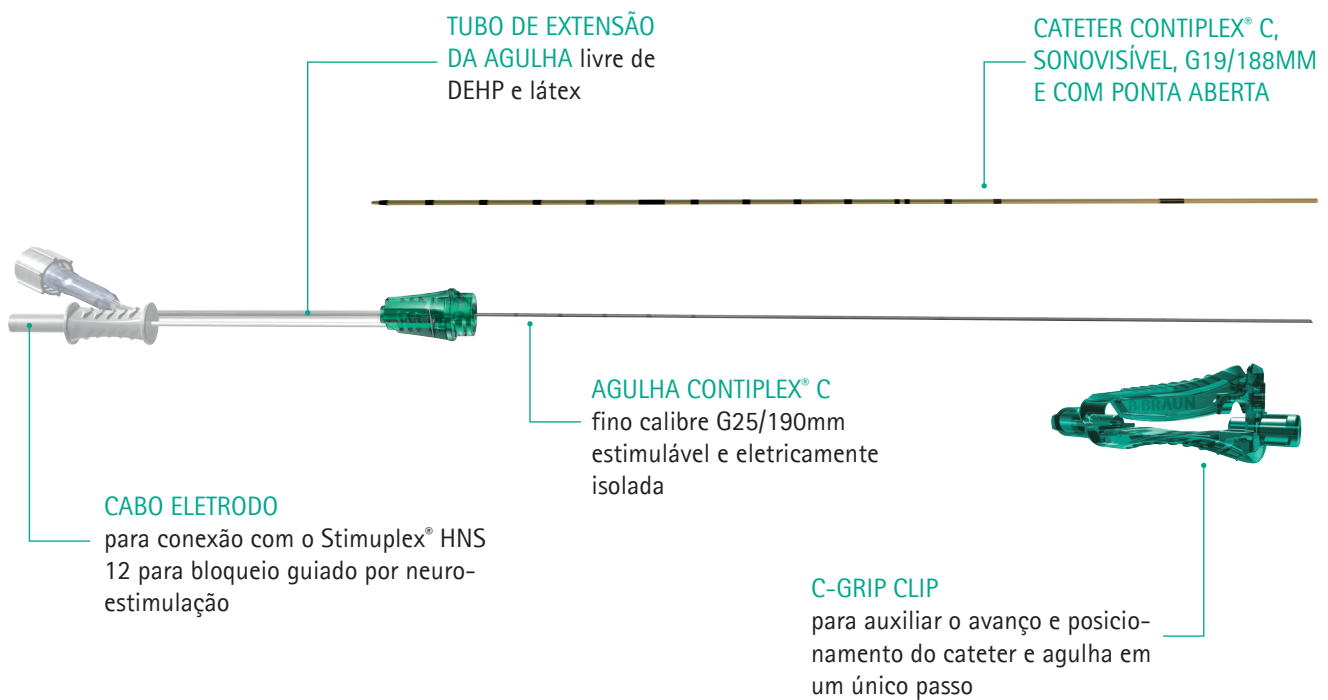


OUTROS COMPONENTES DO KIT

FILTRO PERIFIX® E PERIFIX® PINPAD

Filtro Perifix® – Filtro com membrana em poliamida de 0,22µm, resistente à quebras e rachaduras, conexão luer, identificado por cor amarela, com 0,45ml de priming para retenção de partículas, bactérias e endotoxinas durante anestesia ou analgesia contínua.


Perifix® PinPad – Adesivo hipoalergênico e livre de látex para fixação do filtro Perifix, facilitando o manuseio e a injeção de drogas.

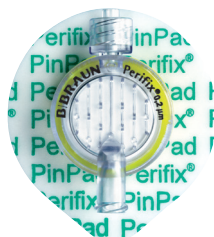

TUBO EXTENSOR 300 mm



CONECTOR DO CATERER CONTIPLEX® C

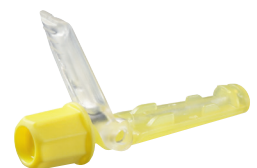

✔ **INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:**

Bloqueios contínuos dos nervos periféricos e do plexo, utilizando neuroestimulação elétrica e/ou orientação por ultrassom, como técnica anestésica de bloqueio em procedimentos cirúrgicos; Tratamento da dor; analgesia para mobilização precoce e fisioterapia; analgesia aguda e a longo prazo em doenças oncológicas, por exemplo.

✔ **MATÉRIAS PRIMAS:**

PTFE, aço inoxidável, PVC, PET, ABS, PP, PE, TPE e PURI.

✔ **ORIENTAÇÕES:**

Para assegurar uma estabilidade adequada da agulha, a distância entre o clip C-Grip até o nível da pele não deve exceder 2cm. Para liberar o cateter da agulha, utilize o clip C-Grip para fixar o cateter cerca de 2cm acima do nível da pele e retire a agulha, puxando-a pelo conector. A agulha desliza facilmente para fora devido ao seu revestimento de parileno.

✔ **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:**

- Temperatura ambiente: 15 - 25°C
- Umidade relativa do ar: 50 - 60%
- Proteger da luz direta.
- Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na embalagem.

✔ **ESTERILIZAÇÃO:**

Óxido de Etileno

✔ **VALIDADE:**


5 anos



NÃO CONTÉM LÁTEX
LIVRE DE DEHP

Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260

CONTIPLEX® C SET

	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO/ GAUGE	BISEL	QUANTIDADE POR CAIXA	CÓDIGO REFERÊNCIA
	CATETER	19G (1.10 X 188mm)	-		
	AGULHA	25G (0.53 x 190mm)	15°	5	4898115
	TUBO EXTENSOR	2.4 X 300mm	-		

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Contiplex® C: - Registro ANVISA nº.: 80136990462

