


FICHA TÉCNICA - CERTOFIX® PROTECT

FAMÍLIA DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS


Conjunto de cateter venoso central duplo lúmen em poliuretano Certon completamente revestido por polihexanida biguanida (PHMB), não liberável na corrente sanguínea, polarizado negativamente, com efeito antitrombogênico e antipatogênico, para proteção do cateter contra colonização microbiana e formação de biofilme por longa duração (até 30 dias); de superfície suave, hidrofílica, elevada flexibilidade e biocompatibilidade, radiopaco; com agulha valvulada para punção em sistema fechado por técnica de Seldinger; fio guia em Nitinol à prova de dobras; dispositivo para posicionamento da ponta do cateter em tempo real por ECG Intracavitário; clip de fixação de base macia e antiderrapante; conectores valvulados; dilatador, bisturi e seringa.

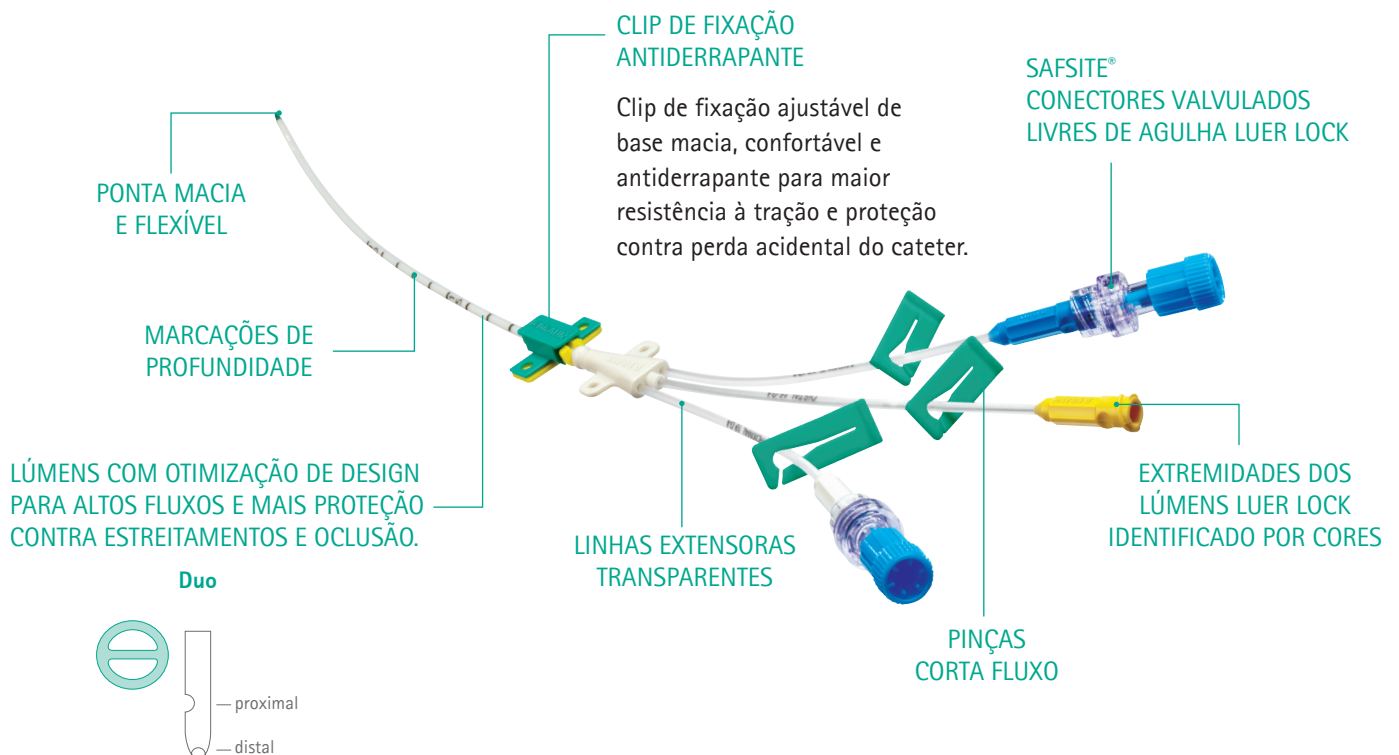

ACESSÓRIOS:

FIO GUIA

Em Nitinol à prova de dobras, altamente resistente, permite o deslizamento suave e facilita a colocação do cateter, mesmo em situações anatômicas extremas, sem deformar; conta com marcações de profundidade e pontas em J e reta flexíveis. Acompanha dispenser.

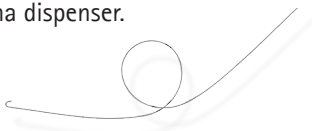

AGULHA VALVULADA

Permite a passagem do fio guia e aspiração de sangue sem desconexão da seringa para punção mais limpa, segura e rápida em sistema fechado por técnica de Seldinger.



CERTODYN® - ADAPTADOR UNIVERSAL

Cabo eletrodo para posicionamento preciso e em tempo real da ponta do cateter por técnica de ECG Intracavitário.



Consulte seu vendedor B. Braun para mais informações.

✔ **INDICAÇÃO DE USO/ FINALIDADE:**

Cateterização da veia cava superior utilizando a técnica de Seldinger para:

- Terapia de infusão prolongada e nutrição parenteral;
- Aplicação de soluções hiperosmolares ou extremamente irritantes para a veia;
- Monitorização da pressão venosa central;
- Impossibilidade da punção venosa periférica.

✔ **MATÉRIAS PRIMAS:**

ABS, PA, PE, PP, PUR, PC, TPE, EP, PI e aço inoxidável.

✔ **PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:**

Não submeter o cateter Certofix® a pressões superiores a 3 bar.

✔ **CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:**

- Temperatura ambiente: 15 - 25°C;
- Umidade relativa do ar: 50 - 60%;
- Proteger da luz direta;
- Utilizar o produto até a data do vencimento indicada na embalagem.

✔ **ESTERILIZAÇÃO:**

Óxido de Etileno

✔ **VALIDADE:**

5 anos



NÃO CONTÉM LÁTEX
LIVRE DE DEHP

Responsável Técnica: Sonia M. Q. de Azevedo | CRF- RJ 4260

CERTOFIX® PROTECT

CARACTERÍSTICAS		CERTOFIX® PROTECT DUO V720 4161211P-07
CATETER	Lúmen	2
	French (Fr)	7
	Comprimento (cm)	20
	Gauge Lúmen	16/ 16G
	Fluxo Min. (ml/min)	55/ 45
	Volume Priming (ml)	0.48/ 0.39
	Diâmetro Externo (mm)	2.4
AGULHA INTRODUTORA	Modelo	Valvulada
	Gauge	18
	Medidas	1.3 X 70mm
FIO GUIA	Comprimento (cm)	50
	Diâm. (mm)	0.89
ACESSÓRIOS	Dilatador (Fr)	8
	Safsite®	2
	Bisturi	1
	Seringa 5ml	1
	Certodyn® Cabo	1
QTD POR CAIXA	Und.	10

B. Braun Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br

Cateteres venosos centrais e acessórios: - Registro ANVISA no.: 80136990539

