


# CARESITE®

## INSTRUÇÕES PARA DESINFECÇÃO

### TRÊS PASSOS SIMPLES PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS

#### 1. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

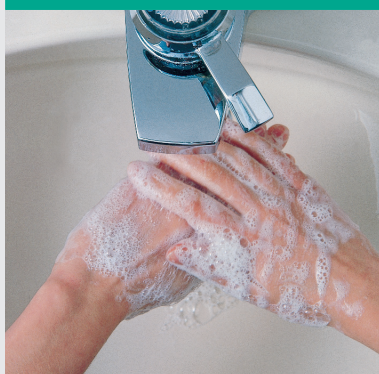

- Use o preconizado por sua instituição.
- Vista Luvas.

#### 2. DESINFECÇÃO DA SUPERFÍCIE



Faça a desinfecção incluindo a área ao redor da superfície

- Realize a desinfecção inclusive ao redor da superfície.
- A desinfecção deve ser realizada com o produto preconizado pela instituição.

#### 3. CONECTANDO E DESCONECTANDO



- **IMPORTANTE:** Não "clampe" as linhas de infusão antes de desconectar a seringa.
- Ao término da administração realize nova desinfecção para remoção de qualquer resíduo.

#### LEMBRE-SE:

- Realizar a desinfecção da válvula com solução alcoólica e aguardar 15 segundos para infusão de cada solução.
- Faça o flush antes e depois da administração de medicamentos.
- Faça o flush antes e depois da coleta de sangue.
- Faça a desinfecção da superfície antes de cada coleta de sangue.
- Ao final da infusão seguir o protocolo institucional para o cuidado com o sítio de punção e tempo de troca da válvula.
- Para informações completas sobre o uso do produto, sempre consulte o manual de instruções.

Válvulas Needle-Free - Caresite® - Registro ANVISA nº 80136990764