


Aesculap Lyostypt[®]

Agente hemostático local

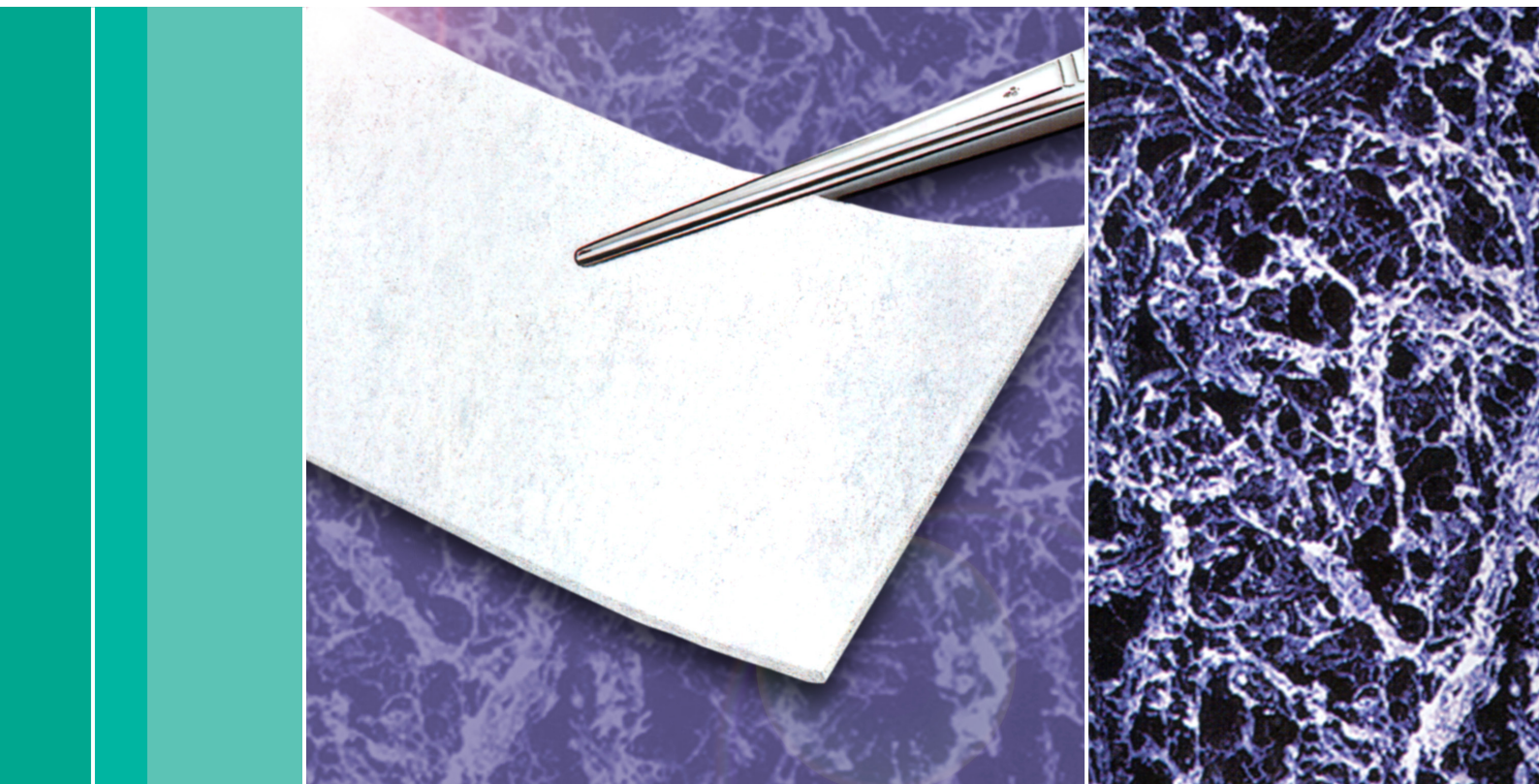


Specialities

Composto por fibras de colágeno, absorvível, natural e resistentes à água.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Como funcionam Agentes Hemostáticos

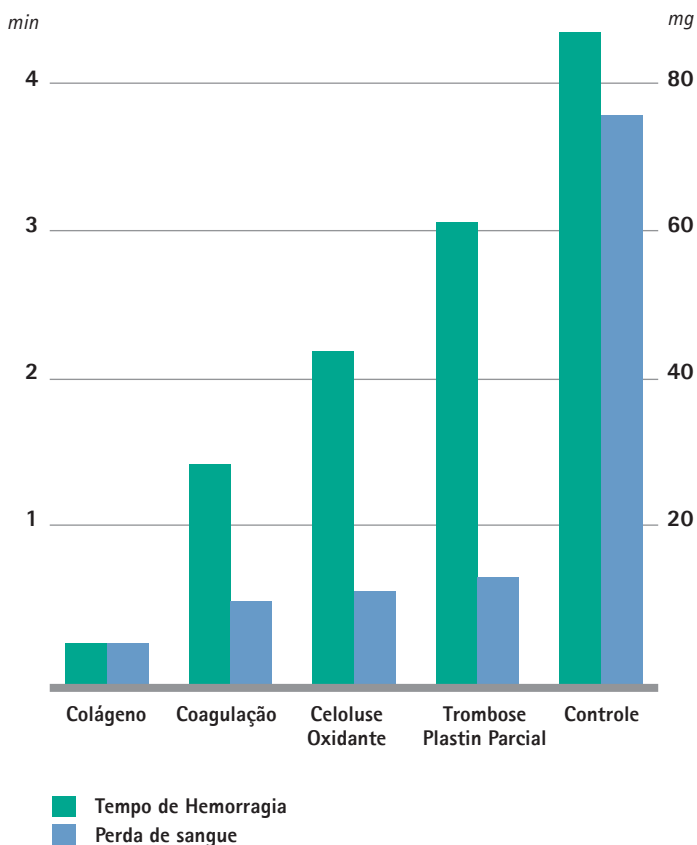

Propriedades

- Fibras de colágeno de alta pureza (purificado e liofilizado)
- Grande capacidade de absorção de líquidos
- Superfície porosa
- Mantém a forma original após entrar em contato com fluidos
- Totalmente absorvível
- Baixa tendência de inchaço

Benefícios

- Excelente compatibilidade com os tecidos
- Excelentes propriedades hemostáticas
- Excelente afinidade com trombócitos

Aplicação

- Cortar lâmina no tamanho apropriado
- Remoção do excesso de sangue
- Pressionar a esponja na ferida até que permaneça em seu lugar
- Após hemostasia remover excesso do material
- A esponja poderá permanecer no corpo do paciente (com exceção do sistema nervoso central)

Indicações

- Vasos capilares
- Hemorragias de órgãos parenquimatosos
- Hemorragias de feridas úmidas
- Suporte para todas técnicas de hemostasia



ESPECIFICAÇÕES

Código	Tamanho	Caixa
1069128	3 x 5 cm	12 unids
1069152	5 x 8 cm	6 unids
1069306	5 x 30 cm	4 unids
1069209	10 x 12 cm	4 unids
1069250	20 x 30 cm	2 unids

Registro ANVISA nº: 80136990465

Laboratórios B. Braun S.A. | Aesculap | Av. Eugênio Borges 1092, Arsenal | 24751-000
 São Gonçalo - RJ - Brasil | S.A.C: 0800 0227286 | www.bbraun.com.br
 Aesculap - a B. Braun company.