

# FICHA TÉCNICA – AESCULAP® VENOSTRIP®

## FLEBO-EXTRATOR

Dispositivo para fleboextração com dreno Redon integrado.

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- Embalagem primária (unitária): Embalagem blister.
- Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 10 unidades.

### COMPONENTES:

- Dreno Redon com orifícios dispostos em 2 linhas, proporcionando uma imagem longitudinal opaca quando submetido ao Raio-X / Poliuretano com impregnação em tungstênio.
- Fio de extirpação de alta flexibilidade e resistência com sonda guia para a localização externa do mesmo / Aço inoxidável.
- Cabeça de extirpação com diversos diâmetros / Resina ABS.
- Cabeça em T para um manuseio seguro / Poliamida.

### CÓDIGO DO PRODUTO:

5523184

### CATEGORIA DO PRODUTO:

Extrator

### INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE:

Venostrip® destina-se à extirpação da veia safena interna na flebite recidivante não curável, de forma conservadora, na insuficiência venosa crônica e nas formações varicosas, muito incômodas do ponto de vista estético.

### CONTRAINDICAÇÕES:


As varizes não devem ser extirpadas durante processos de inflamação aguda. Observar os valores de coagulação normalmente requeridos para a cirurgia. Antes da cirurgia, mediante uma flebografia, deve ser assegurado que as veias profundas estão livres. Se não houver nenhuma prova do refluxo através das veias profundas, como por exemplo, no caso de uma síndrome pós-trombótica, está contra-indicada a extirpação da veia safena interna.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS E INTERAÇÕES:

Hematomas na região da veia extirpada.

### PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS:

- Não se deve proceder à extirpação venosa havendo sinais de inflamação.
- Devem ser observados os valores de coagulação exigidos normalmente em intervenções cirúrgicas.

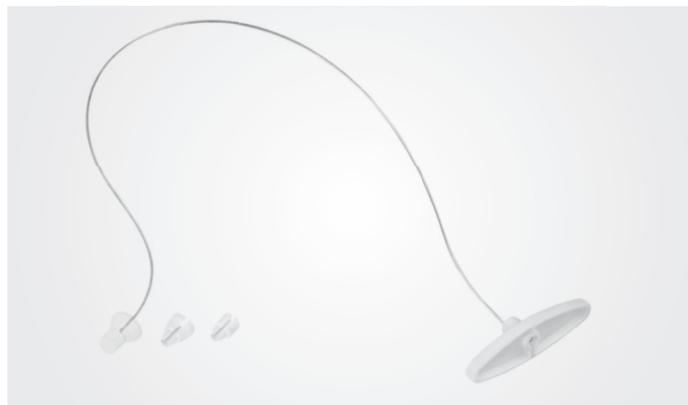

- Previamente à operação, deve-se efetuar uma flebografia a fim de assegurar que as veias profundas estejam livres. Em casos de não se comprovar o refluxo pelas veias profundas, a extirpação da veia safena interna é contra-indicada.
- Não utilizar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo;
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação;
- O produto deve ser utilizado uma única vez, não sendo permitido em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
- O produto deve ser descartado imediatamente após o uso.

### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

- Proteger o produto da ação direta da luz.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

### ESTERILIZAÇÃO:

Esterilizado por óxido de etileno

### REPROCESSAMENTO PROIBIDO CONFORME RDC 156/06:

Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

### VALIDADE:

5 anos, desde de que a embalagem original esteja íntegra e em condições normais de armazenamento.

**Farm. Responsável: Rosane G. R. da Costa – CRF/RJ n.º: 3213**

B. Braun Brasil | [www.bbraun.com.br](http://www.bbraun.com.br)

AESCULAP® – a B. Braun brand