



**LYOSTYPT®**  
COMPRESSAS DE COLÁGENO PARA HEMOSTASIA LOCAL

**Instruções de Uso**

**Descrição:**

Lyostypt® é um hemostático de colágeno tipo bovino, estável à umidade, formado por fibras de colágeno absorvível de origem bovina. O produto mantém a sua estrutura mesmo quando embebido em sangue, podendo se totalmente retirado se assim se desejar, uma vez parada a hemorragia.

A estrutura do colágeno tipo bovino, com uma ampla superfície, constitui um local ideal para adesão das plaquetas, ajudando assim a acelerar o processo de coagulação.

Lyostypt® é esterilizado por radiações gama e está disponível em compressas retangulares de diversos tamanhos.

**Composição:**

Cada 10 cm<sup>2</sup> de Lyostypt® contém 100 mg de fibras colágenas absorvíveis de origem bovina.

**Modo de Ação:**

O contato entre o colágeno e o sangue provoca a agregação adicional do coágulo. A estrutura do colágeno produz uma estabilização adicional ao coágulo.

**Indicações:**

Agente hemostático local indicado nos casos de hemorragias capilares, hemorragias de órgãos parenquimatosos, hemorragias de sangramento lento e como estrutura de suporte para outras técnicas de hemóstase.

**Contra-indicações:**

- Lyostypt® não deve ser aplicado em áreas infectadas;
- Lyostypt® não deve ser utilizado em conexões com endopróteses cimentadas já que essa circunstância poderia reduzir a capacidade adesiva do cimento ósseo;
- Hipersensibilidade conhecida às proteínas de origem bovina.

**Advertências:**

Desconhecidas até o momento.

**Instruções de uso:**

De acordo com o item Modo de Usar.

**Interações Medicamentosas:**

O uso de Lyostypt® reduz a resistência de fixação do cimento ósseo. A eficácia de Lyostypt® é reduzida pelas substâncias antiagregantes e anticoagulantes.

**Modo de Aplicação:**



**LYOSTYPT®**

COMPRESSAS DE COLÁGENO PARA HEMOSTASIA LOCAL

### **Instruções de Uso**

Colocar o tamanho mais adequado de Lyostypt® sobre a ferida ou dentro dela. A estrutura de Lyostypt® pode ser cortada com tesouras no tamanho que se desejar.

A ferida deve ser limpa do sangue o melhor possível e em seguida o Lyostypt® deve ser ligeiramente pressionado sobre a ferida, utilizando-se uma pinça ou um clamp, até que a formação de fibrina garanta a sua fixação.

Uma vez obtida a hemóstase, Lyostypt® deve ser retirado. No caso de feridas cutâneas, deve-se evitar que Lyostypt® penetre nas bordas da pele.

A estrutura de Lyostypt® foi elaborada para permanecer na zona de aplicação, ainda que, uma vez terminada a hemorragia, possa também ser retirado. A absorção de Lyostypt® se completa em aproximadamente 3 semanas, como resultado da fagocitose e reação enzimática. A taxa de absorção depende também da quantidade de Lyostypt® aplicado.

#### **Efeito Secundário:**

Ocasionalmente pode ocorrer a formação de aderências no local de aplicação em caso de uso intra-abdominal.

#### **Prazo de Validade:**

Lyostypt® apresenta um prazo de validade de 5 anos (60 meses) quando conservado na embalagem original e não deve ser utilizado após esta data.

#### **Cuidados Especiais de Conservação:**

Lyostypt® deve ser conservado a 25°C  $\pm$  5°C e utilizado imediatamente após a abertura da embalagem.

#### **Informações Adicionais:**

Lyostypt®, além das suas propriedades hemostáticas, caracteriza-se também pela sua boa moldabilidade, ductibilidade e capacidade de absorção, adaptando-se perfeitamente às superfícies em sangramento. A aderência de Lyostypt® aos instrumentos e gazes é mínima. Lyostypt® não deve ser reesterilizado.

#### **Apresentação:**

Lyostypt® é apresentado em caixas contendo envelopes com dupla parede, com compressas individualizadas em seu interior e assim apresentadas:

Código 1069128: Caixas com 12 compressas de 3 X 5 cm;

Código 1069152: Caixas com 6 compressas de 5 X 8 cm;

Código 1069209: Caixas com 4 compressas de 10 X 12 cm;

Código 1069250: Caixas com 2 compressas de 20 X 30 cm;

Código 1069306: Caixas com 4 compressas de 5 X 30 cm.



**LYOSTYPT®**

COMPRESSAS DE COLÁGENO PARA HEMOSTASIA LOCAL

**Instruções de Uso**

**FABRICADO POR:**

**B. Braun Surgical S. A.**  
Carretera de Terrassa, 121  
08191 Rubi – Barcelona  
Espanha

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**



Laboratórios B|Braun S/A  
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09  
São Gonçalo – RJ – Brasil  
CEP: 24751-000  
Farm. Resp.: Sonia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260  
Registro ANVISA nº: 80136990465  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
SAC: 0800-0227286 (Serviço de Atendimento ao Cliente)