

B. Braun Raqui sem Agulha

Produto de uso único – Destruir após o uso – Proibido Reprocessar. Estéril – Atóxico – Apirogênico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação:

Produto indicado para procedimento em anestesia raquidiana. Possui todos os materiais necessários para a realização desta técnica.

Instruções de uso:

1. Abra e remova a embalagem;
2. Prepare o produto para o procedimento;
3. Prepare o local de punção com o anti-séptico desejado;
4. Aspire os anestésicos conforme o desejado;
5. Efetue o procedimento de anestesia raquidiana seguindo as melhores práticas recomendadas;
6. Descarte todo o material em coletor de resíduos de saúde apropriado.

Precauções e Advertências:

- Produto estéril e apirogênico. Esterilizado por óxido de etileno;
- Use técnica asséptica;
- Usar somente se a embalagem unitária estiver íntegra;
- Inspeccione previamente cada componente antes do uso. Se danificados não utilize;
- Observe as precauções universais de segurança. Siga as precauções universais ou protocolo da Instituição de Saúde sobre o uso e descarte de materiais médico-hospitalares;
- Procure atenção médica caso ocorra acidente;
- Comunique acidentes com agulha imediatamente;
- Trate a área conforme o protocolo da Instituição de Serviço de Saúde.
- Acidentes com agulhas contaminadas podem causar doenças graves tais como hepatite, HIV (SIDA) entre outras doenças infecciosas;
- Não reencape agulhas. Tentar reencape as agulhas é perigoso;
- Descarte os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados;
- Se houver resistência excessiva, não force a agulha, pois poderá danificar a mesma;
- Não tente consertar uma agulha danificada. Descarte-a e utilize uma nova;
- Deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e devidamente treinados;
- Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.
- Mantenha estocado e transporte em condições adequadas.

Armazenamento:

Conservar em local seco e limpo.

Quant.	Componentes
01	Campo cirúrgico fenestrado circular
04	Compressas de gaze
03	Espumas para anti-sepsia
01	Papel toalha
01	Seringa 3 ml
01	Seringa 5 ml
01	Agulha 18G 1 1/2" (1,20 x 40)
01	Agulha 26G 1/2" (0,45 x 13)
01	Agulha 22G 1 1/4" (0,70 x 30)
01	Cuba

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº: 8.01369.90584
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.005 Rev. C 02.24

B | BRAUN