

IN STOPPER

(Tapon in)

Tampa com membrana sem látex para injeções intermitentes

Produto de uso único – Destruir após o uso – Proibido reprocessar. Estéril – Apirrogênico – Atóxico – Esterilizado por Óxido de etileno.

Prazo de Validade: 5 anos, desde que a embalagem original esteja íntegra.

Instruções de uso:

1. Lave as mãos;
2. Abra a embalagem, utilizando técnica asséptica;
3. Retire a tampa protetora do conector do IN STOPPER;
4. Conecte o IN STOPPER ao sistema de infusão do paciente;
5. Proceda à anti-sepsia da mem-

brana autocicatrizante do IN STOPPER;

6. Utilizando uma agulha hipodérmica conectada à seringa, perfure a membrana autocicatrizante do IN STOPPER e administre a solução.

Precauções:

Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo; Não é permitido sua reesterilização sob nenhuma hipótese.

Cuidados de Conservação:

Manter o produto em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

Tapa con membrana sin látex para inyecciones intermitentes

Producto de un solo uso – Desechar después de usar – Prohibido re-procesar.

Estéril – Apirógeno – Atóxico – Esterilizado por Óxido de Etileno.

Plazo de Validez: 5 años, desde que el embalaje original esté íntegro.

Instrucciones de uso:

1. Lavar las manos;
2. Abra el paquete, utilizando la técnica de asepsia;
3. Retirar la tapa protectora del conector IN STOPPER;
4. Conectar el IN STOPPER al sistema de infusión del paciente.

5. Proceder a la anti-sepsia de la membrana auto-cicatrizante del IN STOPPER;

6. Utilizando una aguja hipodérmica conectada a la seringa, perforar la membrana auto-cicatrizante del IN STOPPER.

Precauciones:

No usar el producto caso sea verificado la violación de la integridad del envoltorio o de su contenido; No es permitido su re-esterilización bajo ninguna hipótesis

Cuidados de Conservación:

Mantener el producto en ambiente limpio y seco, con cuidados necesarios para que el embalaje permanezca íntegro.

Fabricado por:

B. Braun Melsungen AG
D-3508-Melsungen – Germany

Comercializado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 – S. Gonçalo – RJ – Brasil
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30113
CNPJ: 31.673.254/0001-02 – Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.022 Rev. B 02.24

B | BRAUN