

# Equipos de Sangue e hemoderivados para Bomba de Infusão

## Infusomat Space Set Sangue / Infusomat Sangue Set CG 150 Sangue

Produto de uso único – Destruir após o uso. Proibido reprocessar. Estéril – Apirogênico – Atóxico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

### Precauções:

- Produto Isento de DEHP (DOP). Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino;
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Não é permitido sua reesterilização sob nenhuma hipótese;
- Conservar em local seco e arejado de forma a manter sua integridade.

### Cuidados de conservação:

Mantener o produto em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.


Producto de un solo uso – Destruir después de usar. Estéril – Apirogénico – Atóxico. Esterilizado por Óxido de Etileno.

### Precauciones:

- Cuidados de conservación: Mantener el producto en ambiente limpio y seco con los cuidados necesarios para integridad del paquete. PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP) Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones;
- No usar el producto en caso que el paquete esté violado o el contenido dañado;
- No es permitido re-esterilizar de ninguna forma;
- Conservar en sitio seco y aireado de manera que permita mantener la integridad del producto.

### Cuidados de conservación:

Mantener el producto en ambiente limpio y seco con los cuidados necesarios para integridad del empaque.

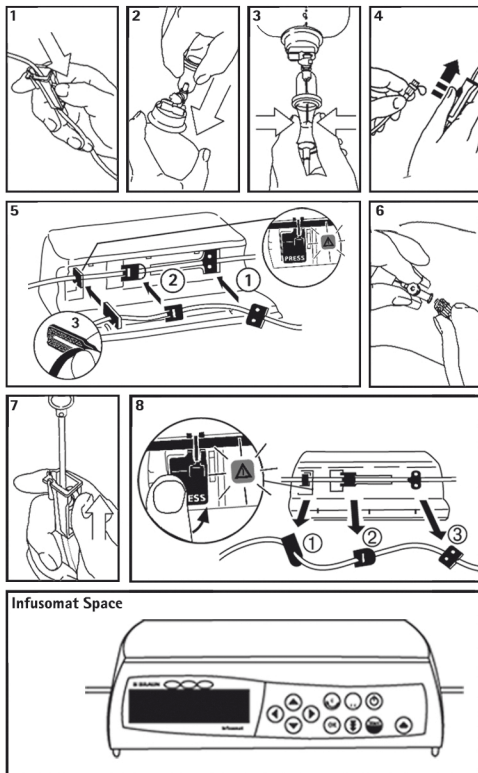

### Instruções para Uso:

1. Fechar a pinça rolete
2. Conectar o equipo ao recipiente com a solução;
3. Preencher a câmara de gotejamento;
4. Executar o preenchimento total da linha retirando todo o ar;
5. Instalar o equipo na Infusomat® Space;
6. Conectar a extremidade da linha ao paciente;
7. Abrir a pinça rolete para liberar o fluxo corretamente.
8. Atenção para os detalhes da fixação do equipo na Infusomat® Space.

Fabricado por:

### Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
CEP: 24751-000 – S. Gonçalo – RJ – Brasil  
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90440  
CNPJ: 31.673.254/0001-02 – Indústria Brasileira  
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.001 Rev. D 02.24

# B | BRAUN

Antes de utilizar o produto, verifique no rótulo a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.