

# Perfusor SET

## Dispositivo para a extensão de equipamentos.

Estéril - Apirogênico  
Produto de Uso Único - Destruir após o Uso - Proibido reprocessar.  
Esterilizado por Óxido de Etileno

### Indicação:

Extensão para equipos de infusão parenteral, adaptável à utilização em bombas de infusão, apresentado em comprimento variável. Perfusor Set é um produto de uso único, atóxico, estéril e apirogênico.

### Dispositivos para extensión de líneas.

Estéril - Apirógeno  
Producto de un solo uso - Destruir después de usar - Prohibido reprocessar.  
Esterilizado por Oxido de Etileno

### Indicaciones:

Extensión para equipos de infusión parenteral, adaptable en bombas de infusión, presentación en medida variable. Perfusor Set es un producto de un solo uso, atóxico, estéril y Apirógeno.

### Instruções de Uso:

- Abrir a embalagem sob condições assépticas.
- Verificar se os conectores apresentam-se com os protetores de esterilização.
- Retirar o protetor do cone Luer.
- Adaptar o conector Luer na seringa ou equipo do Perfusor.
- Preencher o tubo com líquido estéril.
- Retirar o protetor do intermediário Luer (macho).
- Conectar o intermediário Luer no acesso venoso.
- Proceder ao controle de infusão da solução.

### Precauções e Advertências:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.

- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- Deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

### Instrucciones de Uso:

- Abrir el paquete en condiciones asépticas
- Averiguar se los conectores están con los protectores de esterilización
- Quitar el protector del conector Luer.
- Ajustar el conector Luer en la seringa o equipo del Perfusor
- Llenar el tubo con el líquido estéril
- Quitar el protector del intermediario Luer (macho)
- Conectar el intermediario Luer en el acceso venoso
- Seguir con controle de infusión de solución.

### Precauciones y Advertencias:

- PRODUCTO LIBRE DE DEHP (DOP)
- Los experimentos con animales han demostrado que el DEHP (DOP) ES potencialmente tóxico para la reproducción. Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento, no se excluye por completo un riesgo (en el caso de uso a largo plazo) sobre todo para los bebés varones.
- No utilizar se la integridad del paquete o producto se presenta danificada o violada
- Todos los procedimientos referentes al manejo del producto deben ser realizados con mayores cuidados para evitar contaminación.
- Debe ser utilizado solamente una vez, prohibida reutilización o reesterilización
- Transporte el producto con cuidado necesario para mantener la integridad del mismo.



Fabricado por:

### Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
Registro ANVISA n.º.: 1.00085.30030  
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.013 Rev. B 02.24

**B | BRAUN**