

Perfusor SET FS

Dispositivo para a extensão de equipamentos.

Estéril – Apirogênico
Produto de Uso Único – Destruir após o Uso – Proibido reprocessar.
Esterilizado por Óxido de Etileno

Indicação:

Extensão para equipos de infusão parenteral, adaptável à utilização em bombas de infusão, apresentado em comprimento variável. Perfusor Set FS é um produto de uso único, atóxico, estéril e apirrogênico.

Instruções de Uso:

- Abrir a embalagem sob condições assépticas.
- Verificar se os conectores apresentam-se com os protetores de esterilização.
- Retirar o protetor do cone Luer.
- Adaptar o conector Luer na seringa ou equipo do Perfusor.
- Preencher o tubo com líquido estéril.

- Retirar o protetor do intermediário Luer (macho).
- Conectar o intermediário Luer no acesso venoso.
- Proceder ao controle de infusão da solução.

Precauções:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- Deve ser utilizado uma só vez, não se permitindo em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização.
- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

Prazo de Validade: 5 anos, desde que a embalagem original esteja íntegra.

Dispositivos para extensión de equipos

Estéril – Apirógeno
Producto de un solo uso – Deschar después de usar – Prohibido reprocessar
Esterilizado por Óxido de Etileno

Indicaciones:

Extensión para equipos de infusión parenteral, adaptable en bombas de infusión, con presentación en medida variable. Perfusor Set FS es un producto de un solo uso, atóxico, estéril y Apirógeno.

Instrucciones de Uso:

- Abrir el paquete en condiciones asépticas
- Averiguar se los conectores están con los protectores de esterilización
- Quitar el protector del conector Luer.
- Ajustar el conector Luer en la seringa o equipo del Perfusor

- Llenar el tubo con el líquido estéril
- Quitar el protector del intermediario Luer (macho)
- Conectar el intermediario Luer en el acceso venoso
- Seguir con control de infusión de solución.

Precauciones:

- No utilizar se la integridad del paquete o producto se presenta danificada o violada
- Todos los procedimientos referentes al manejo del producto deben ser realizados con mayores cuidados para evitar contaminación.
- Debe ser utilizado solamente una vez, prohibida reutilización o reesterilización
- Transporte el producto con cuidado necesario para mantener la integridad del mismo.

Prazo de Validez: 5 años desde que la embalagem original esté íntacta.

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 – S. Gonçalo – RJ – Brasil
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30378
CNPJ: 31.673.254/0001-02 – Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.014 Rev. B 02.24