

Equipo para administração gravitacional de sangue e hemoderivados

Microfix Sangue, Sangoflex Spin Lock

Estéril - Apirogênico.

Produto de Uso Único - Destruir após o Uso.

Esterilizado por Óxido de Etileno.

Prazo de Validade: 3 anos, desde que a embalagem original esteja íntegra.

Indicação:

A família de equipo para administração gravitacional de sangue e hemoderivados, seja no volume total ou em volumes fracionados (buretas). Possui filtro específico conforme preconizado na norma ISO 1135-4.

Instruções de Uso:

• Microfix Sangue

Sob condições assépticas:

1. Fechar as pinças.
2. Retirar o protetor da ponta perfurante e conectá-la à bolsa de sangue/hemoderivado. Suspender a bolsa de sangue/hemoderivado.
3. Abrir a tampa do filtro bacteriológico e a pinça para encher a câmara graduada com o volume desejado e a seguir, fechar a pinça. A câmara apresenta filtro para retenção de coágulos.
4. Pressionar com movimentos sucessivos a câmara flexível, enchendo-a até 50% de sua capacidade, aproximadamente.
5. Retirar a tampa protetora do conector e abrir a pinça para expulsar o ar, enchendo o segmento do tubo. Fechar a pinça.
6. Manter a tampa protetora do conector até o momento de adaptá-lo ao dispositivo de infusão.

• Sangoflex Spin Lock

1. Retirar assepticamente o conjunto do invólucro protetor e depois de efetuada a assepsia dos sítios de inserção das bolsas de hemoderivados, de acordo com o protocolo da instituição.
2. Retirar o protetor da ponta perfurante e fazer a devida perfuração.
3. Fechar a pinça rolete
4. Pressionar a porção inferior da câmara de gotejamento, preenchendo a mesma até a porção inferior com sangue ou hemoderivado,
5. Abrir a pinça rolete permitindo o preenchimento do tubo com o sangue ou hemoderivado até a porção distal do equipo (conector). Não há necessidade de retirada da tampa protetora do conector Luer durante o preenchimento do equipo.
6. Fechar a pinça rolete,
7. Retirar o protetor do conector Luer,

8. Conectar o equipo ao acesso venoso do paciente.
9. Ajustar o fluxo, através da pinça rolete, de acordo com o gotejamento ou tempo de infusão prescritos.

Precauções:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a reprodução. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.
- As administrações de sangue e hemoderivados deverão seguir os protocolos da ANVISA e das instituições que procedem as administrações.



Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal

CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil

Registro ANVISA nº.: 80136990712

CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira

S.A.C.: 0800-0227286

3.107.012 Rev. C 02.24

B | BRAUN