

# Sterifix® Infusão

## Filtro de 0,2 µm para Infusão de Soluções.

Estéril - Esterilizado por Óxido de Etileno - Apirrogênico.  
Produto de uso único - Proibido reprocessar.  
Destruir após o uso.

### Indicação:

Destina-se à utilização com qualquer dispositivo de infusão, indicado para retenção de partículas, bactérias e bolhas de ar que estejam na solução a ser administrada. O filtro pode ser utilizado por um período máximo de 24 horas.

### Modo de Usar:

1. Retire a tampa protetora da entrada do filtro e conecte ao equipo de infusão.
2. Mantenha o filtro abaixo do nível da solução. Abra o regulador de fluxo do equipo de infusão. Preencha o filtro e o tubo extensor invertendo-os para eliminação completa do ar.
3. Feche o regulador de fluxo no equipo de infusão.
4. Retire a tampa protetora da conexão luer lock e conecte à via de acesso venoso.
5. Identificar sobre o filtro a data e hora da troca do mesmo (no máximo 24 horas). Se for necessário substituir antecipadamente o filtro, transferir os dados do filtro substituído para o novo, a fim de que o sistema não seja utilizado mais de 24 horas.

## Precauções, Advertências, Cuidados de armazenamento e transporte:

- O produto não deverá ser utilizado para administração de hemoderivados, suspensões, emulsões de lipídios, fármacos que não estejam completamente diluídos na solução utilizada.
- O filtro não deve ser utilizado para a esterilização de soluções que estejam visivelmente contaminadas por bactérias ou pirogênicos.
- O produto deve ser transportado com os cuidados necessários, de forma a manter a integridade do invólucro e do seu conteúdo.
- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Utilizar técnicas assépticas em todas as etapas da utilização do produto.
- O produto deve ser utilizado uma só vez, não sendo permitido em hipótese alguma seu reaproveitamento ou reesterilização. Proibido reprocessar.
- O produto, logo após o uso, deve ser imediatamente descartado.
- Manter o produto em ambiente limpo e seco, de forma a manter sua integridade.
- Transportar o produto com os cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

## Filtro de 0,2 µm para infusión de solución.

Estéril - Esterilizado por óxido de etileno - Apirrogeno.  
Producto de un solo uso: reprocesamiento prohibido.  
Destruir después de su uso.

### Indicacion:

Está destinado a ser utilizado con cualquier dispositivo de infusión, indicado para la retención de partículas, bacterias y burbujas de aire que se encuentran en la solución a administrar. El filtro se puede utilizar durante un máximo de 24 horas.

### Modo de uso:

1. Retire la tapa protectora de la entrada del filtro y conéctela al equipo de infusión.
2. Mantenga el filtro por debajo del nivel de la solución. Abra el regulador de flujo del equipo de infusión. Llene el filtro y el tubo de extensión invirtiéndolos para una eliminación completa del aire.
3. Cierre el regulador de flujo del equipo de infusión.
4. Retire la cubierta protectora de la conexión de bloqueo luer y conéctela a la ruta de acceso venoso.
5. Identifique la fecha y hora del cambio de filtro (máximo 24 horas) en el filtro. Si es necesario reemplazar el filtro con anticipación, transfiera los datos del filtro reemplazado al nuevo, para que el sistema no se use por más de 24 horas.

## Precauciones, advertencias, almacenamiento y cuidado del transporte:

- El producto no debe utilizarse para la administración de hemoderivados, suspensiones, emulsiones lipídicas, medicamentos que no estén completamente diluídos en la solución utilizada.
- El filtro no debe utilizarse para la esterilización de soluciones que estén visiblemente contaminadas por bacterias o pirogênicos.
- El producto debe transportarse con los cuidados necesarios, a fin de mantener la integridad del envoltorio y su contenido.
- No utilice el producto si se encuentra una violación de la integridad del envoltorio o de su contenido.
- Utilice técnicas asépticas en todas las etapas de uso del producto.
- El producto debe usarse una sola vez, y bajo ninguna circunstancia se permite su reutilización o reesterilización. Reprocesamiento prohibido.
- El producto, inmediatamente después de su uso, debe desecharse inmediatamente.
- Mantener el producto en un ambiente limpio y seco, para mantener su integridad.
- Transporte el producto con el cuidado necesario para mantener su integridad.

Nº do Lote:

Data de esterilização:

Fabricado por:

### Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal  
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil  
Registro ANVISA nº.: 1.00085.30021  
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira  
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.009 Rev. C 02.24

**B | BRAUN**