

Equipos para Administração Gravitacional de Soluções e/ou Medicamentos Parenterais Fotossensíveis

Intrafix Primeline Air FS

Produto de uso único – Destruir após o uso.

Esteril – Atóxico – Apirogênico. Esterilizado por Óxido de Etileno. Proibido reprocessar.

Indicação:

Equipo para administração gravitacional de soluções e/ou medicamentos parenterais fotosensíveis.

Precações e Advertências:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Artigo de uso único, não sendo permitido o reaproveitamento ou reesterilização;
- Descartar imediatamente após o uso.

Cuidados de armazenamento e transporte:

- Conservar em ambiente limpo e seco, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.
- Transportar com os cuidados necessários para manter a integridade do produto.

Instruções para Uso:

- 1 - Retirar o equipo do invólucro protetor;
- 2 - Retirar a tampa protetora da ponta perfurante;
- 3 - Introduzir a ponta perfurante do equipo no frasco/ampola;
- 4 - Fechar a pinça;
- 5 - Pendurar o frasco / ampola no suporte, preencher a câmara de gotejamento, abrir a pinça e realizar o preenchimento do tubo;
- 6 - Após preenchido o tubo, fechar a pinça, conectar a extremidade distal no cateter do paciente e então regular o fluxo conforme a prescrição médica.

Producto de un solo uso – Desechar después de usar.

Esteril – Atóxico – Apirogênico. Esterilizado por Óxido de Etileno. Proibido reprocessar.

Indicación:

Equipos para suministración gravitacional de soluciones y/o medicamentos parenterales fotosensibles.

Precauciones y Advertencias:

- No utilizar producto se el paquete o el contenido no está intacto;


- Manejar con cuidado para no causar contaminación;
- Producto de un solo uso; Prohibido reaprovechamiento o reesterilización;
- Desechar después de usar.

Cuidados con Almacenamiento y transporte:

- Conservar en sitio limpio y seco, con todos los cuidados para que el paquete quede intacto.
- Transportar con cuidados necesarios para mantener la integridad del producto.

Instrucciones de Uso:

- 1 - Quitar la línea del paquete;
- 2 - Quitar la tapa protectora de la punta perforante;
- 3 - Introducir la punta perforante de la línea en la ampolla/frasco;
- 4 - Cerrar la tranca corriente;
- 5 - Fijar el frasco / ampolla en el soporte, llenar la cámara de goteo, abrir la tranca y llenar el tubo;
- 6 - Después de llenado el tubo, cerrar la pinza, conectar la extremidad distal en el catéter del paciente y entonces arreglar el flujo conforme prescripción médica.

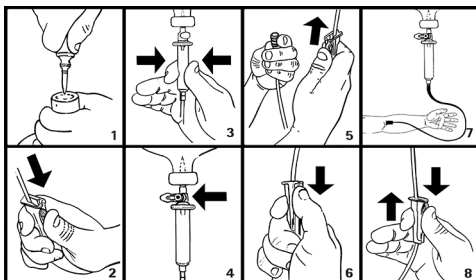

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90447
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.017 Rev. C 02.24