

Família de Torneiras de 3 Vias com Extensão

Discofix 3 com Extensofix; Discofix com Extensofix Neonatal; Discofix com Extensofix 120 cm; Extensofix com 3 Discofix 20 cm; Discofix 3 com Extensofix 20 cm; Discofix 3 com Extensofix 60 cm e Discofix com Extensofix 60 cm Spin Lock.

Produto de uso único – Proibido Reprocessar.
Estéril – Apirrogênico – Atóxico.
Esterilizado por Óxido de Etileno.

Indicação de uso:

Indicados para injeção ou infusão de medicamentos e transfusão de san-

gue e hemoderivados simultânea ou alternadamente e para monitorização da pressão venosa central, anestesia e drenagem torácica.

Instruções de uso:

1- Retirar assepticamente o conjunto do invólucro protetor e fazer a conexão ao dispositivo de infusão.

2- Com movimento torcional sobre a torneira, pode-se obter:

- **1º posição:** Todas as vias abertas servem para infusões simultâneas ou para 1 infusão e 1 injeção simultaneamente;
- **2º posição:** Só a via lateral aberta para infusão, injeção ou

determinação da PVC (pressão venosa central);

- **3º posição:** A via principal aberta para injeção, infusão ou transfusão;
- **4º posição:** Vias principal e lateral, abertas para enchimento do tubo manômetro para PVC ou para dreno;
- **5º posição:** Todas as vias fechadas (sem fluxo).

Precauções:

- Produto Isento de DEHP (DOP).
- Experiências em animais demonstraram que o DEHP (DOP) é potencialmente tóxico para a re-

produção. Considerando o estado atual do conhecimento, não é de excluir completamente um risco (em caso de utilização de longo prazo) especialmente para bebês do sexo masculino.

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro ou do seu conteúdo.
- Não é permitida sua reesterilização sob nenhuma hipótese.
- Conservarem local seco e arejado de forma a manter sua integridade.



Sem DEHP

Fabricado por:

Laboratórios B. Braun S.A.

Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09, Arsenal
CEP: 24751-000 - S. Gonçalo - RJ - Brasil
Registro ANVISA nº.: 8.01369.90556
CNPJ: 31.673.254/0001-02 - Indústria Brasileira
S.A.C.: 0800-0227286

3.107.025 Rev. B 02.24

B | BRAUN