

Instruções de Uso

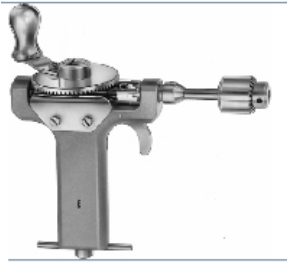
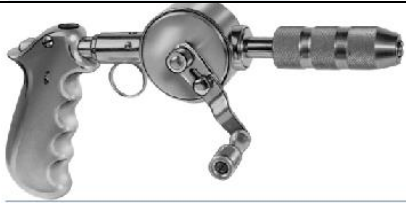



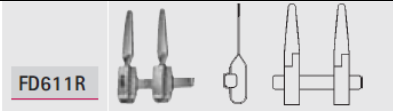
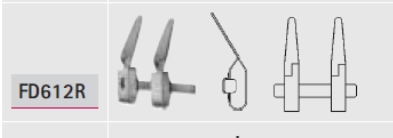
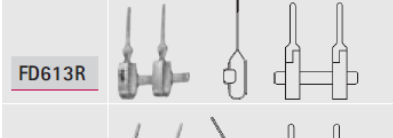
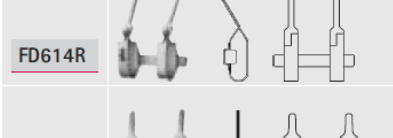

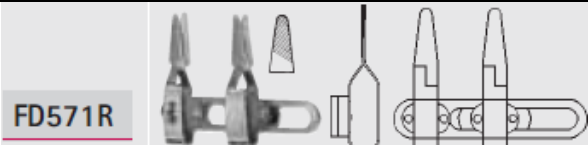
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

O modelo de Instruções de Uso abaixo se aplica aos seguintes produtos:

ILUSTRAÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	BV013R	SEPARADOR LOGAN MODIF.REILL 3X3D.50MM
	FB651R	TORNIQUETE RUMEL-BELMONT D:4MM 325MM
	BV403R	GANCHO SCOVILLE 55MM PARA BV401R
	BV405R	LÂMINA SCOVILLE 63X25MM PARA BV401R
	BV406R	LÂMINA SCOVILLE 63X51MM PARA BV401R
	BV409R	LÂMINA TAYLOR 47X37MM 3D.PARA BV401R
	BV411R	LÂMINA TAYLOR 62X52MM 4D.PARA BV401R
	EF965R	CLAMPE CIRCUNCISÃO WINKELMANN DIÂM.12MM
	EF966R	CLAMPE CIRCUNCISÃO WINKELMANN DIÂM.16MM
	EF967R	CLAMPE CIRCUNCISÃO WINKELMANN DIÂM.20MM
	OM185R	APOIO TORÁCICO NEGUS
	FO190R	CLAMPE RET.ÓSSEA LOWMAN 170MM
	FO191R	CLAMPE RET.ÓSSEA LOWMAN 205MM
	FO192R	CLAMPE RET.ÓSSEA LOWMAN-GERSTER 210MM
	FO193R	CLAMPE RET.ÓSSEA LOWMAN-HOGLUND 175MM
	FO199R	CLAMPE TRACÇÃO GERSTER

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

	FR005R	TRÉPANO MANUAL BUNNELL
	FR010R	TRÉPANO MANUAL AESCULAP SEM CHAVE
 <p>FR 011 R 200 mm, 13"</p>	FR011R	TRÉPANO MANUAL AESCULAP "JACOBS CHUCK"
	FD570R	APROXIMADOR BIEMER CPL.C/PINÇA APLIC.
	FD636R	PAR AGULHAS SUBST.PARA FD635R
 <p>FD611R</p>	FD611R	APROXIMADOR BIEMER-MUELLER RE.9,0MM
 <p>FD612R</p>	FD612R	APROXIMADOR BIEMER-MUELLER CUR.9,0MM
 <p>FD613R</p>	FD613R	APROXIMADOR BIEMER-MUELLER RE.9,0MM
 <p>FD614R</p>	FD614R	APROXIMADOR BIEMER-MUELLER CUR.9,0MM
 <p>FD615R</p>	FD615R	APROXIMADOR BIEMER-MUELLER RE.4,5MM
 <p>FD571R</p>	FD571R	APROXIMADOR BIEMER




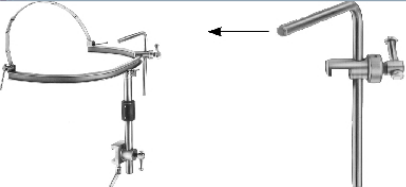



Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

	BT709R	ARMAÇÃO P/FIXAÇÃO DE MESAS OP
	BV606R	LÂMINA MÉDIA 47X80MM
	BV609R	LÂMINA MÉDIA 62X76MM
	BV611R	LÂMINA MÉDIA 80X80MM
	BV621R	SEPARADOR SÓ BALFOUR
	BV634R	RETRACTOR ABDOMINAL BALFOUR
	BV645R	ARMAÇÃO SÓ DENIS-BROWNE P/BV650R
	BV648R	LÂMINA SÓ 40X30MM P/BV650R
	BV649R	LÂMINA SÓ 40X40MM P/BV650R
	BV650R	RETRACTOR ABDOMINAL DENIS-BROWNE COMPL.
	BV653R	ARMAÇÃO SÓ SEMM 255X220MM P/BV654R
	BV654R	RETRACTOR ABDOMINAL SEMM COMPL.
	BV655R	LÂMINA SÓ 46X64MM PARA BV654R
	BV656R	LÂMINA SÓ 52X54MM PARA BV654R
	BV657R	LÂMINA SÓ 82X98MM PARA BV654R
	BV660R	RETRACTOR ABDOMINAL KIRSCHNER COMPL.
	BV661R	ARMAÇÃO SÓ KIRSCHNER ABAULADA RÍGIDA
	BV664R	ARMAÇÃO SÓ KIRSCHNER 274X354MM
	BV665R	ARMAÇÃO SÓ KIRSCHNER 274X294MM







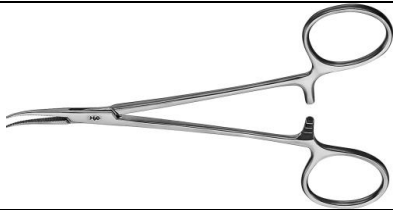

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS




	<p>BV685</p>	<p>RETRACT.P/ABDOM.TURNER WARWICK COMPL.</p>
	<p>FB840R</p>	<p>CONTRACTOR COSTELAS SELLORS 200MM</p>
	<p>FB841R</p>	<p>CONTRACTOR COSTELAS BAILEY 200MM</p>
	<p>FB842R</p>	<p>CONTRACTOR COSTEL.BAILEY-GIBBON 200MM</p>
	<p>FB844R</p>	<p>CONTRACTOR COSTEL.BAILEY-BABY 150MM</p>
	<p>FF187R</p>	<p>APOIO P/MÃO CPL.PARA FF150R</p>
	<p>FF150R</p>	<p>APOIO P/MÃO GILSBACH CPL.</p>
	<p>FF152R</p>	<p>TUBO DE SUPORTE SÓ PARA FF150R</p>
	<p>FF153R</p>	<p>APOIO P/MÃO SÓ PARA FF150R</p>
	<p>FF151R</p>	<p>BLOCO DE APOIO SÓ</p>
	<p>FF190R</p>	<p>ELEMENTO DE FIXAÇÃO CPL.PARA FF150R</p>
	<p>FF191R</p>	<p>TUBO SUPORTE P/PINÇAS MAYFIELD P/FF150R</p>
	<p>FF193R</p>	<p>CONECTOR GIRÁVEL</p>

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

	<p>FC145R</p>	<p>RETRAT.LATERAL XS RÍGIDO 59X37MM</p>
	<p>FC140R</p>	<p>RETRAÇÃO LATERAL XS</p>
	<p>FC143R</p>	<p>RETRACTOR LATERAL XS SÓ C/ARTICUL.</p>
	<p>BV015R</p>	<p>RETRACTOR 4X4D.CORTANTE 100MM</p>
	<p>BV008R</p>	<p>SEPARADOR OBTUSO 4X4D.100MM</p>
	<p>BT710R</p>	<p>DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO ROCHARD</p>
	<p>MB454R</p>	<p>PINÇA CIRÚR.ADSON 2X3D.120MM</p>
	<p>FD575R</p>	<p>APROXIMADOR CPL.C/CHAVE</p>

Instruções de Uso**INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS**

	FD635R	APROXIMADOR NERVOS BIEMER C/CHAVE
	FW062R	S4C CONTRA-SUPORTE
	FW104R	S4C OCCIPÍCIO CONTRA-SUPORTE

Indicações

Os Instrumentais Cirúrgicos Não Cortante Articulado Reutilizáveis foram confeccionados para serem utilizados em procedimentos cirúrgicos, e estão disponíveis em diferentes dimensões e formatos.

Princípio de Funcionamento

A utilização destes componentes é decidida pelo profissional médico-cirurgião, sob sua própria responsabilidade e em função das respectivas indicações.

Modo de Uso do produto

O cirurgião deve dominar, tanto na teoria como na prática, as técnicas cirúrgicas reconhecidas. Ler e respeitar o manual cirúrgico antes de utilizar os instrumentos, e guardá-lo num lugar seguro para consultas posteriores.

Composição

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

Os Instrumentais são fabricados em aço inoxidável martensítico e austenítico conforme a ISO 7153-1.

Condições de Armazenamento

Armazenar todos os componentes em sua embalagem original.

O produto deve ser mantido em local limpo, seco, arejado e à temperatura ambiente.

Condições para o Transporte

Durante o transporte devem ser evitados impactos, pois o produto pode ser danificado.

Condições de Manipulação

Todo instrumental cirúrgico deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado.

Realizar uma limpeza ultra-sônica:

- como apoio mecânico eficaz, no caso de limpeza/desinfecção à mão.
- para um pré-tratamento de produtos com incrustações secas, antes da limpeza/desinfecção à máquina.
- como apoio mecânico integrado à limpeza/desinfecção à máquina.
- para tratamento final de produtos com incrustações residuais não removidas, após a limpeza/desinfecção à máquina.

Advertências/Precauções

- A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza.
- Verificar o produto depois de cada limpeza, desinfecção e secagem quanto a: segura, limpeza, bom funcionamento e danos, por ex., no isolamento, partes corroídas, soltas, tortas, quebradas, fendidas, desgastadas ou demolidas.
- Ler, seguir e guardar, como literatura de referência, as instruções de utilização.

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

- Utilizar o produto apenas para o fim a que se destina
- Antes de ser esterilizado, sempre limpar e desinfetar bem o produto.
- Guardar o produto novo ou não usado num lugar seco, limpo e protegido.
- Submeter o produto antes de cada utilização a uma inspeção visual para detectar possíveis: partes soltas, deformadas, quebradas, fendidas, desgastadas e demolidas.
- Substituir imediatamente as peças danificadas por peças originais.
- Não utilizar produtos que apresentam danos ou defeitos. Apartar imediatamente os produtos danificados.
- Os produtos e os acessórios só podem ser operados e utilizados por pessoas que disponham da formação, dos conhecimentos ou da experiência necessários.

Esterilização

- Validade Indeterminado
 - Produto não estéril
 - Processo de esterilização validado
- Esterilizar os instrumentos em autoclave a uma pressão máxima de 3 bar, 143°C.
- Selecionar os instrumentos e colocá-los na respectiva bandeja. Ter certeza de que todas as juntas estão abertas.
- Organize o instrumental nas prateleiras na posição em que será colocado na mesa auxiliar, no centro cirúrgico.
- Envolve a bandeja com uma dupla cobertura, etiqueta e prenda com barbante ou fita para autoclave.
- Os instrumentos devem ser cobertos com uma toalha de mão e deixados envolvidos se forem utilizados imediatamente.

Formas de apresentação comercial

Os instrumentais são embalados individualmente em bolsas de polietileno que são seladas termicamente.

Instruções de Uso

INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NÃO CORTANTE ARTICULADO REUTILIZÁVEIS

Fabricado por:

AESULAP AG
Am Aesculap Platz
D-78532-Tuttlingen

Importado e Distribuído por:

Laboratórios B. Braun S/A
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 -
Arsenal
São Gonçalo – RJ Cep 24751-000
CNPJ: 31.673.254/0001-02
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260
Registro ANVISA nº: 80136990797
SAC: 0800 0227286