

## Instruções de Uso

### Instrumental Cirúrgico Não Cortante Articulado Aesculap

---

---

#### *Indicações*

---

Os Instrumentais foram confeccionados para serem utilizados em procedimentos cirúrgicos, e estão disponíveis em diferentes dimensões e formatos.

---

#### *Princípio de Funcionamento*

---

A utilização destes componentes é decidida pelo profissional médico-cirurgião, sob sua própria responsabilidade e em função das respectivas indicações.

---

#### *Modo de Uso do produto*

---

O cirurgião deve dominar, tanto na teoria como na prática, as técnicas cirúrgicas reconhecidas. Ler e respeitar o manual cirúrgico antes de utilizar os instrumentos, e guardá-lo num lugar seguro para consultas posteriores.

---

#### *Composição*

---

Os Instrumentais são fabricados em aço inoxidável martensítico e austenítico conforme a ISO 7153-1.

---

#### *Condições de Armazenamento*

---

Armazenar todos os componentes em sua embalagem original.  
O produto deve ser mantido em local limpo, seco, arejado e à temperatura ambiente.

---

#### *Condições para o Transporte*

---

## Instruções de Uso

### Instrumental Cirúrgico Não Cortante Articulado Aesculap

---

Durante o transporte devem ser evitados impactos, pois o produto pode ser danificado.

---

#### *Condições de Manipulação*

---

Todo instrumental cirúrgico deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado.

Realizar uma limpeza ultra-sônica:

- como apoio mecânico eficaz, no caso de limpeza/desinfecção à mão.
- para um pré-tratamento de produtos com incrustações secas, antes da limpeza/desinfecção à máquina.
- como apoio mecânico integrado à limpeza/desinfecção à máquina.
- para tratamento final de produtos com incrustações residuais não removidas, após a limpeza/desinfecção à máquina.

---

#### *Advertências/Precauções*

---

- A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza.
- Verificar o produto depois de cada limpeza, desinfecção e secagem quanto a: segura, limpeza, bom funcionamento e danos, por ex., no isolamento, partes corroídas, soltas, tortas, quebradas, fendidas, desgastadas ou demolidas.
- Ler, seguir e guardar, como literatura de referência, as instruções de utilização.
- Utilizar o produto apenas para o fim a que se destina
- Antes de ser esterilizado, sempre limpar e desinfetar bem o produto.
- Guardar o produto novo ou não usado num lugar seco, limpo e protegido.
- Submeter o produto antes de cada utilização a uma inspeção visual para detectar possíveis: partes soltas, deformadas, quebradas, fendidas, desgastadas e demolidas.
- Substituir imediatamente as peças danificadas por peças originais.
- Não utilizar produtos que apresentam danos ou defeitos. Apartar imediatamente os produtos danificados.
- Os produtos e os acessórios só podem ser operados e utilizados por pessoas que disponham da formação, dos conhecimentos ou da experiência necessários.

## Instruções de Uso

### Instrumental Cirúrgico Não Cortante Articulado Aesculap

---

---

#### *Esterilização*

---

- Validade Indeterminado
  - Produto não estéril
  - Processo de esterilização validado
- Esterilizar os instrumentos em autoclave a uma pressão máxima de 3 bar, 143°C.
- Selecionar os instrumentos e colocá-los na respectiva bandeja. Ter certeza de que todas as juntas estão abertas.
- Organize o instrumental nas prateleiras na posição em que será colocado na mesa auxiliar, no centro cirúrgico.
- Envolve a bandeja com uma dupla cobertura, etiqueta e prenda com barbante ou fita para autoclave.
- Os instrumentos devem ser cobertos com uma toalha de mão e deixados envolvidos se forem utilizados imediatamente

---

#### *Formas de apresentação comercial*

---

Os instrumentais são embalados individualmente em bolsas de polietileno que são seladas termicamente.

**Fabricado por:**  
AESCULAP AG  
Am Aesculap Platz  
D-78532-Tuttlingen

**Importado e Distribuído por:**  
Laboratórios B. Braun S/A  
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 -  
Arsenal  
São Gonçalo – RJ Cep 24751-000  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260  
Registro ANVISA nº: 80136990699  
SAC: 0800 0227286