

INSTRUÇÕES DE USO

INSTRUMENTAL NÃO CORTANTE NÃO ARTICULADO SEM INSERTO AESFULAP®

(Instrumentos cirúrgicos)

Produto Médico-Hospitalar. NÃO ESTÉRIL. Antes de utilizar o produto, proceder a limpeza e esterilização do mesmo. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja previamente aberta ou violada.

INTRODUÇÃO

Os Instrumentais Não Cortantes Não Articulados Sem Inserto Aesculap® foram confeccionados para ser utilizados em procedimentos cirúrgicos, e estão disponíveis em diferentes dimensões e formatos.

A utilização destes componentes é decidida pelo profissional médico-cirurgião, sob sua própria responsabilidade e em função das respectivas indicações.

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

Os instrumentais são fabricados em aço inoxidável ISO 7153^{XI}.

UTILIZAÇÃO E MANUSEIO

Devem ser seguidas as orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização da norma NBR 14332 ("Instrumentais cirúrgicos e odontológicos de aço inoxidável - Orientações sobre manuseio, limpeza e esterilização").

Antes de utilizar o produto, este deverá ser preparado, retirando-o da embalagem e submetendo-o à esterilização.

As instruções de limpeza/esterilização dos equipamentos onde o produto será lavado (uso de desinfetantes, máquinas de lavar, equipamentos de ultra-som, esterilizadores, etc.) deverão ser observadas.

Siga estritamente as doses dos produtos químicos para desinfecção, limpeza, neutralização e cuidados.

Limpe os instrumentos novos antes da primeira utilização.

Remover os instrumentos de locais úmidos (bacia ou máquina de desinfecção e lavagem) imediatamente após o tratamento.

Aguarde os instrumentos esfriarem, e então confira a limpeza e realize uma inspeção funcional. Separe os instrumentos manchados ou danificados.

Antes da esterilização, lubrifique as juntas com produtos à base de parafina líquida. Proceda à esterilização em embalagens apropriadas.

Pelo fato do produto ser entregue não estéril, não há restrições referentes ao seu período de uso, ou seja, seu prazo de validade é indeterminado.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DA LIMPEZA

Enxágüe os instrumentos que tenham tido contato com materiais cáusticos imediatamente.

Deposite os instrumentos delicadamente e arrume-os cuidadosamente.

ADVERTÊNCIAS

Todo instrumental cirúrgico deve ser submetido à esterilização antes de ser utilizado.

A esterilização do instrumental cirúrgico não é substituída pela limpeza.

Uma vez esterilizado, os instrumentais devem ser abertos somente no centro cirúrgico, em condições assépticas.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

- ◆ Limpeza antes de esterilizar: lavagem na máquina com um produto bactericida e antifúngico de largo espectro. Recomenda-se o uso de soluções aquosas com pH superior a 4.

Antes de usar qualquer produto de limpeza, é recomendado efetuar testes de oxidação.

- ◆ Produtos de limpeza proibidos: ácidos minerais fortes (sulfídrico, nítrico, clorídrico, etc.) ou ácidos fortes de Lewis tais como cloreto de zinco ou hipoclorito de sódio, da soda ou uma concentração elevada de íons de hipoclorito ou de permanganato.

Deve-se evitar uma exposição prolongada a uma temperatura elevada, à maioria dos diluentes agressivos (tais como o dicloroetano, as soluções fenólicas e de anilina).

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizar os instrumentos em autoclave a uma pressão máxima de 3 bar, 143°C.

Selecionar os instrumentos e colocá-los na respectiva bandeja. Ter certeza de que todas as juntas estão abertas. Organize o instrumental nas prateleiras na posição em que será colocado na mesa auxiliar, no centro cirúrgico.

Envolva a bandeja com uma dupla cobertura, etiqueta e prenda com barbante ou fita para autoclave.

Os instrumentos devem ser cobertos com uma toalha de mão e deixados envolvidos se forem utilizados imediatamente.

TRATAMENTO DE INSTRUMENTOS NOVOS

A fim de evitar a condensação dentro de embalagens plásticas, por exemplo, como o resultado da variação de temperatura, recomenda-se que os instrumentos sejam removidos e guardados em salas de armazenagem com umidade controlada, abertos para o ambiente.

Os instrumentais não devem ser guardados nos mesmos locais onde se armazenam produtos químicos, que podem exalar vapor corrosivo.

B | BRAUN

Instrumentos novos devem ser limpos antes da primeira esterilização ou uso. Limpeza, lavagem e cuidados devem ser tomados de acordo com o critério descrito acima. Capas protetoras devem ser totalmente removidas.

ACONDICIONAMENTO

Os Instrumentais são fornecidos não estéreis, embalados unitariamente em sacos plásticos (1 un) ou em bandejas de esterilização.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar todos os componentes em sua embalagem original.

O produto deve ser mantido em local limpo, seco e arejado.

Durante o transporte devem ser evitados impactos, pois o produto pode ser danificado.

APRESENTAÇÃO

Os Instrumentais são fornecidos não estéreis, embalados unitariamente em sacos plásticos (1 un) ou em bandejas de esterilização.

Fabricado por:

AESFULAP AG
Am Aesculap Platz
D-78532-Tuttlingen

Importado e Distribuído por:

Laboratórios B. Braun S/A
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av.
Jequitibá, 09 - Arsenal
São Gonçalo - RJ Cep 24751-000
CNPJ: 31.673.254/0001-02
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo
CRF-RJ 4260
Registro ANVISA nº: 80136990502
SAC: 0800 0227286