




## Instruções de Uso

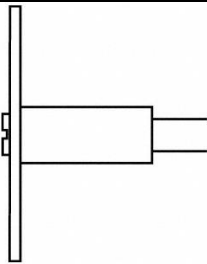

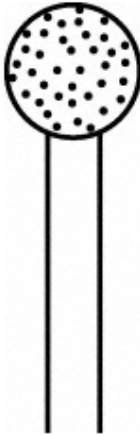












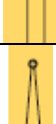

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

*O modelo de instruções de uso se aplica aos modelos abaixo:*

<b>DISCO CORTANTE DE DIAMANTE</b>			
<b>Indicação: Preparação de metal (implantes, parafusos ósseos, etc.)</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Figura representativa</b>	<b>Validade (para embalagem íntegra)</b>
GD763R	HI-LINE DISCO CORTE DIAMANTE II D25MM		5 anos
GD840R	HI-LINE DISCO CORTE DIAM.EXTRA-CURTA D25		5 anos
<b>FRESA DIAMANTADA</b>			
<b>Indicação: perfurar, esculpir ou preparar osso/tecido para colocação de parafusos, implantes, etc</b>			
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Figura representativa</b>	<b>Validade (para embalagem íntegra)</b>
GP141R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D0,6		5 anos
GP142R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D0,8		5 anos
GP143R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D1,0		5 anos
GP144R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D1,0		5 anos
GP145R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D1,4		5 anos
GP146R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D1,4		5 anos
GP147R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D1,8		5 anos
GP148R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D1,8		5 anos
GP149R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D2,3		5 anos
GP150R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D2,3		5 anos
GP151R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D2,7		5 anos
GP152R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE+ D2,7		5 anos
GP153R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D3,0		5 anos
GP154R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D3,5		5 anos
GP155R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D4,0		5 anos
GP156R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D4,5		5 anos
GP157R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D5,0		5 anos
GP158R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DIAMANTE D6,0		5 anos
GP311R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D2,3		5 anos
GP312R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D3,0		5 anos
GP313R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D3,5	5 anos	
GP314R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D4,0	5 anos	
GP315R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D4,5	5 anos	
GP316R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D5,0	5 anos	
GP317R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DIAMANTE D6,0	5 anos	
GD894R	FRESA DIAMANTE D1,8MM/ISO 018 2,35X51MM		8 anos

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

GD895R	FRESA DIAMANTE D2,3MM/ISO 023 2,35X51MM		8 anos
GD896R	FRESA DIAMANTE D2,7MM/ISO 027 2,35X51MM		8 anos
GD897R	FRESA DIAMANTE D3,1MM/ISO 031 2,35X51MM		8 anos
GD898R	FRESA DIAMANTE D3,5MM/ISO 035 2,35X51MM		8 anos
GD899R	FRESA DIAMANTE D4,0MM/ISO 040 2,35X51MM		8 anos
GD900R	FRESA DIAMANTE D4,5MM/ISO 045 2,35X51MM		8 anos
GD901R	FRESA DIAMANTE D5,0MM/ISO 050 2,35X51MM		8 anos
GE411R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D1,0MM		8 anos
GE412R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D1,4MM		8 anos
GE413R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D1,8MM		8 anos
GE414R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D2,3MM		8 anos
GE415R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D2,7MM		8 anos
GE416R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D3,1MM		8 anos
GE417R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D4,0MM		8 anos
GE418R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D5,0MM		8 anos
GE419R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE I D6,0MM		8 anos
GE511R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D1,0MM		8 anos





## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos











GE512R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D1,4MM		8 anos
GE513R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D1,8MM		8 anos
GE514R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D2,3MM		8 anos
GE515R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D2,7MM		8 anos
GE516R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D3,1MM		8 anos
GE517R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D4,0MM		8 anos
GE518R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D5,0MM		8 anos
GE519R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II D6,0MM		8 anos
GE613R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D1,8MM		8 anos
GE614R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D2,3MM		8 anos
GE615R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D2,7MM		8 anos
GE616R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D3,1MM		8 anos
GE617R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D4,0MM		8 anos
GE618R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D5,0MM		8 anos

Instruções de Uso

**Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos**

GE619R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE III D6,0MM		8 anos
GD786R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D1,0MM		5 anos
GD787R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D1,0MM		5 anos
GD789R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D1,4MM		5 anos
GD790R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D1,4MM		5 anos
GD792R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D2,3MM		5 anos
GD793R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D2,3MM		5 anos
GD794R	HI-LINE FRESA DIAMANTE III D2,3MM		5 anos
GD795R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D3,1MM		5 anos
GD796R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D3,1MM		5 anos

**Instruções de Uso****Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos**

GD797R	HI-LINE FRESA DIAMANTE III D3,1MM		5 anos
GD798R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D4,5MM		5 anos
GD799R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D4,5MM		5 anos
GD800R	HI-LINE FRESA DIAMANTE III D4,5MM		5 anos
GD801R	HI-LINE FRESA DIAMANTE I D6,0MM		5 anos
GD802R	HI-LINE FRESA DIAMANTE II D6,0MM		5 anos
GD803R	HI-LINE FRESA DIAMANTE III D6,0MM		5 anos
GD814R	HI-LINE FRESA DIAMANTE XL-I D3,1MM		5 anos
GD815R	HI-LINE FRESA DIAMANTE XL-II D3,1MM		5 anos
GD816R	HI-LINE FRESA DIAMANTE XL-I D6,0MM		5 anos

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

GD817R	HI-LINE FRESA DIAMANTE XL-II D6,0MM		5 anos
GD830R	HI-LINE FRESA DIAMANTE EXTRA-CURTA D3,1		5 anos
GD831R	HI-LINE FRESA DIAMANTE EXTRA-CURTA D4,5		5 anos
GD832R	HI-LINE FRESA DIAMANTE EXTRA-CURTA D6,0		5 anos
GE714R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE XL-I D2,3MM		8 anos
GE716R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE XL-I D3,1MM		8 anos
GE717R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE XL-I D4,0MM		8 anos
GE718R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE XL-I D5,0MM		8 anos
GE719R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE XL-I D6,0MM		8 anos
GE381R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D1,0		8 anos
GE382R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D1,4		8 anos
GE383R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D1,8		8 anos
GE562R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II+ D1,4MM		8 anos

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

GE563R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE II+ D1,8MM		8 anos
<b>FRESA DIAMANTADA GROSSA</b> <b>Indicação: perfurar, esculpir ou preparar osso/tecido para colocação de parafusos, implantes, etc</b>			
Código	Descrição	Figura representativa	Validade (para embalagem íntegra)
GP161R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D2,0		5 anos
GP162R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE+ GROSSA D2,0		5 anos
GP163R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D2,3		5 anos
GP164R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE+ GROSSA D2,3		5 anos
GP165R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D3,0		5 anos
GP166R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE+ GROSSA D3,0		5 anos
GP167R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE++ GROSSA D3,0		5 anos
GP168R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D4,0		5 anos
GP169R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D5,0		5 anos
GP170R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE GROSSA D6,0		5 anos
GP321R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE GROSSA D2,3		5 anos
GP322R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE GROSSA D3,0		5 anos
GP323R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE GROSSA D4,0		5 anos
GP324R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE GROSSA D5,0		5 anos
GP325R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE GROSSA D6,0		5 anos
GE424R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA I D2,3MM		8 anos
GE425R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA I D3,1MM		8 anos
GE624R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA III D2,3MM		8 anos
GE625R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA III D3,1MM		8 anos
GD694R	HI-LINE FRESA DIAMANTE GROSSA I D3,1MM		5 anos
GD692R	HI-LINE FRESA DIAMANTE GROSSA II D2,3MM		5 anos

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

GD695R	HI-LINE FRESA DIAMANTE GROSSA II D3,1MM		5 anos
GD693R	HI-LINE FRESA DIAMANTE GROSSA III D2,3MM		5 anos
GD696R	HI-LINE FRESA DIAMANTE GROSSA III D3,1MM		5 anos
GE524R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA II D2,3MM		8 anos
GE525R	HI-LINE XS FRESA DIAM.GROSSA II D3,1MM		8 anos
GE394R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D3,1		8 anos
GE398R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D5,0		8 anos
GE399R	HI-LINE XS FRESA DIAMANTE P/GB740R D6,0		8 anos

#### **FRESA DIAMANTADA X-GROSSA**

**Indicação: perfurar, esculpir ou preparar osso/tecido para colocação de parafusos, implantes, etc**

Código	Descrição	Figura representativa	Validade (para embalagem íntegra)
GP173R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE X-GROSSA D3,0		5 anos
GP174R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE X-GROSSA D4,0		5 anos
GP175R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE X-GROSSA D5,0		5 anos
GP176R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE X-GROSSA D6,0		5 anos
GP177R	ELAN 4 1 ANEL FR.DIAMANTE X-GROSSA D7,0		5 anos
GP328R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE X-GROSSA D4,0		5 anos
GP329R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE X-GROSSA D5,0		5 anos
GP330R	ELAN 4 2 ANÉIS FR.DIAMANTE X-GROSSA D6,0		5 anos
GD713R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA I D4,5MM		5 anos
GD717R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA I D6,5MM		5 anos
GD714R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA II D4,5		5 anos
GD718R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA II D6,5		5 anos
GD719R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA III D6,5		5 anos



## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

GD716R	HI-LINE FRESA DIAMANTE X-GROSSA III D4,5		5 anos	
<b>FRESA DIAMANTADA OLIVIFORME</b> <b>Indicação: perfurar, esculpir ou preparar osso/tecido para colocação de parafusos, implantes, etc</b>				
Código	Descrição	Figura representativa	Validade (para embalagem íntegra)	
GP211R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.DIAM.D1,5		5 anos	
GP212R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.+ DIAM.D1,5		5 anos	
GP213R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.DIAM.D2,0		5 anos	
GP214R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.+ DIAM.D2,0		5 anos	
GP215R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.DIAM.D2,5		5 anos	
GP216R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.+ DIAM.D2,5		5 anos	
GP217R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.DIAM.D3,0		5 anos	
GP218R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.+ DIAM.D3,0		5 anos	
GP219R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.DIAM.D4,0		5 anos	
GP220R	ELAN 4 1 ANEL FRESA OLIVIFOR.+ DIAM.D4,0		5 anos	
GP370R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA OLIVIFOR.DIAM.D3,0		5 anos	
GP371R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA OLIVIF.+ DIAM.D3,0		5 anos	
GE555R	HI-LINE XS FRESA OLIVFOR.DIAM.II+ D3,1MM			8 anos
<b>FRESA DIAMANTADA DE OSTEÓFITO</b> <b>Indicação: perfurar, esculpir ou preparar osso/tecido para colocação de parafusos, implantes, etc</b>				
Código	Descrição	Figura representativa	Validade (para embalagem íntegra)	
GP238R	ELAN 4 1 ANEL FRESA DE OSTEÓFITO D4,0		5 anos	
GP388R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DE OSTEÓFITO+ D4,0		5 anos	
GP389R	ELAN 4 2 ANÉIS FRESA DE OSTEÓFITO+ D6,0		5 anos	
GE539R	HI-LINE XS FRESA CÓN.DIAM.RETRÓGRADA II		8 anos	
GE639R	HI-LINE XS FRESA CÓN.DIAM.RETRÓGRADA III		8 anos	

### Indicações

Esse instrumental tem indicação para preparação de tecido rígido, cartilagem, congêneres e materiais em substituto ósseo e para preparação de metal (implantes, parafusos ósseos, etc.)

## Instruções de Uso

---

### **Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos**

---

#### ***Princípio de Funcionamento***

---

Os instrumentos são conectados a motores que fazem corte, raspagem e modelagem de tecido duro, cartilagem e semelhantes, assim como corte, perfuração no osso e materiais de substituição óssea nas áreas de neurocirurgia, cirurgia de otorrinolaringologia e cirurgia buco-maxilo-facial, ortopedia e traumatologia

---

#### ***Contraindicações***

---

Não é permitida a utilização da ferramenta no sistema nervoso central ou no sistema cardiovascular central.

---

#### ***Modo de Uso do produto***

---

Utilizar as ferramentas em combinação com a serra, o raspador, o furador, a fresa e o amolador de mão respectivos de acordo com as indicações existentes na etiqueta da embalagem e das instruções de uso dos aparelhos

---

#### ***Composição***

---

Os instrumentos são fabricados em aço inoxidável com revestimento de diamante.

---

#### ***Condições de Armazenamento***

---

Os instrumentais devem ser mantidos em local limpo, seco e arejado com as seguintes condições:

Temperatura -10°C a 55°C

Umidade relativa do ar 10% a 70%

---

#### ***Condições para o Transporte***

---

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

Durante o transporte devem ser evitados impactos, pois o produto pode ser danificado.

Temperatura -10°C a 55°C

Umidade relativa do ar 10% a 70%

### Condições de Manipulação

#### Limpeza prévia manual com ultra-sons e escova

Fase	Passo	T [°C/°F]	t [min]	Conc. [%]	Qualidade da água	Características químicas
I	Mergulhar	TA (frio)	>30	50	A-P	Detergentes enzimáticos*
II	Lavagem	TA (frio)	-	-	A-P	-
III	Limpeza por ultra-sons	55/131	>15	2	A-P	Concentrado isento de aldeído, fenol e QAV, pH - 9**
IV	Limpeza das escovas	TA (frio)	-	-	A-P	-

A-P: Água potável  
TA: Temperatura ambiente

#### Fase I

► Mergulhar completamente o produto, no mínimo, durante 30 min numa solução de limpeza enzimática. Para tal, assegurar que todas as superfícies acessíveis ficam molhadas.

#### Fase II

► Lavar completamente o produto (todas as superfícies acessíveis) em água corrente.

#### Fase III

- Utilizar suporte adequado para conservar as lâminas dos produtos.
- Se possível, colocar o suporte na vertical.
- Limpar o produto, no mínimo, durante 15 min num banho de ultra-sons (frequência de 35 kHz).

Durante este procedimento,

assegurar que todas as superfícies acessíveis ficam molhadas, evitando-se sombras acústicas.

#### Fase IV

► Limpar o produto com uma escova adequada até os resíduos serem completamente removidos da superfície.

## Instruções de Uso

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

#### Limpeza alcalina automática e desinfecção térmica

Tipo de aparelho: aparelho de limpeza/desinfecção de câmara única sem ultra-sons

Fase	Passo	T [°C/°F]	t [min]	Qualidade da água	Características químicas
I	Lavagem prévia	<25/77	3	A-P	-
II	Limpeza	55/131	10	A-CD	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Concentrado, alcalino:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH - 13</li> <li>- &lt;5 % de tensoactivos aniônicos</li> </ul> </li> <li>■ Solução de uso 0,5 %               <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH - 11*</li> </ul> </li> </ul>
III	Lavagem intermédia	>10/50	1	A-CD	-
IV	Desinfecção térmica	90/194	5	A-CD	-
V	Secagem	-	-	-	Conforme o programa para aparelho de limpeza e de desinfecção

A-P: Água potável

A-CD: Água completamente dessalinizada (desmineralizada, em termos microbiológicos, no mínimo com qualidade de água potável)

► Após uma limpeza/desinfecção automática, verificar as superfícies visíveis quanto à presença de possíveis resíduos.

#### Controle, manutenção e verificação

- Deixar arrefecer o produto até à temperatura ambiente.
- Verificar o produto, depois de cada limpeza e desinfecção, quanto a: limpeza, bom funcionamento e danos.
- Verificar o produto quanto a lâminas quebradas, danificadas e rombas.
- Eliminar de imediato um produto danificado.

---

### *Advertências/Precauções*

---

- Os produtos e os acessórios apenas podem ser operados e utilizados por pessoas que possuam a formação, os conhecimentos ou a experiência necessários.
- Ler, cumprir e guardar as instruções de utilização.
- Não modificar, afiar ou reparar as ferramentas.
- Antes de cada utilização, verificar visualmente o produto em relação a: peças soltas, deformadas, quebradas, com fendas, desgastadas e partidas.

## Instruções de Uso

---

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

- ▶ Não utilizar produtos que apresentem danos ou defeitos. Eliminar de imediato um produto danificado.
  - ▶ Guardar o produto novo ou não utilizado num local seco, limpo e protegido.
  - ▶ Colocar o produto de substituição à disposição durante a operação, de modo a poder proceder a uma troca no caso de haver essa necessidade.
  - ▶ É possível que partículas de diamante possam se desprender durante o uso. Desse modo, os instrumentos devem ser enxaguados e aspirados com precisão durante e após o uso.
- Os riscos gerais associados a uma intervenção cirúrgica não estão descritos nestas instruções de utilização.
- O cirurgião assume a responsabilidade pela execução correta da intervenção cirúrgica.
  - O cirurgião deverá dominar, tanto na teoria como na prática, as técnicas cirúrgicas reconhecidas.
  - ▶ De forma a evitar danos devido a montagem ou funcionamento incorreto e para não comprometer a garantia e a responsabilidade do fabricante:
    - Utilizar o produto apenas de acordo com as suas instruções de utilização.
    - Respeitar as informações de segurança e as instruções de manutenção.
    - Combinar apenas produtos da Aesculap entre si.

---

### *Esterilização*

---

- Validade: 5 ou 8 anos (de acordo com item)
- Prazo de validade após aberto: Indeterminado
- Produto estéril – Radiação Gama
- Processo de esterilização validado

#### Esterilização a vapor

- Garantir que o produto de esterilização tem acesso a todas as superfícies internas e externas.
- Processo de esterilização validado
- Esterilização a vapor pelo processo de vácuo fracionado
  - Esterilizador a vapor segundo a EN 285 e validado segundo a EN ISO 17665
  - Esterilização pelo processo de vácuo fracionado a 134 °C, tempo de exposição de 5 min
- No caso de esterilização simultânea de vários produtos num esterilizador a vapor: assegurar que a carga máxima admissível do esterilizador a vapor, definida pelo fabricante, não é excedida.

## Instruções de Uso

---

### Instrumentos Diamantados Estéreis com conexão a equipamentos

---

#### *Formas de apresentação comercial*

---

São fornecidos estéreis unitariamente em um blister feito de Tyvek, PET / PE armazenados em caixa de cartolina contendo 1 unidade.

**Fabricado por:**

AESULAP AG  
Am Aesculap Platz  
D-78532-Tuttlingen

**Importado e Distribuído por:**

Laboratórios B. Braun S/A  
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 -  
Arsenal  
São Gonçalo – RJ Cep 24751-000  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260  
Registro ANVISA nº: 80136990862  
SAC: 0800 0227286