

## Instruções de Uso

### VENOSTRIP® - Flebo-Extrator – Modelo: 5523184

---

---

#### *Indicações*

---

A Venostrip® destina-se à extirpação da veia safena interna na flebite recidivante não curável, de forma conservadora, na insuficiência venosa crônica e nas formações varicosas, muito incômodas do ponto de vista estético.

---

#### *Princípio de Funcionamento*

---

O Dispositivo para fleboextração com dreno Redon integrado, de uso único, atóxico, estéril e apirogênico.

---

#### *Modo de Uso do produto*

---

#### **Modo de Aplicação:**

1. Localizar e ligar a veia safena interna no ponto de sua entrada na veia femoral;
2. Localizar e expor, por meio de pequena incisão, a veia safena interna na região da articulação tibiotársica;
3. Seccionar a veia safena interna já ligada e introduzir na veia a extremidade do fio extirpador, que possui a peça de junção sem rosca, empurrando-o até a outra incisão;
4. Abrir a veia e expor a extremidade do fio extirpador. Conectar o cabo nesta extremidade e o dreno Redon sobre a rosca no outro extremo;
5. Se necessário, inserir a cabeça de extirpação de tamanho apropriado, naquela fixada ao dreno Redon, antes de conectá-lo;
6. Proceder à extirpação da veia, puxando o cabo;
7. Ligar as veias perfurantes grandes, caso necessário, por meio de pequenas contra incisões;
8. Simultaneamente à extirpação, posicionar o dreno Redon na trajetória da ferida;
9. Logo após a extirpação do dreno Redon em posição horizontal e conectar um frasco ou bolsa para drenagem;

## Instruções de Uso

### VENOSTRIP® - Flebo-Extrator – Modelo: 5523184

---

10. Cortar a cabeça de extirpação do dreno Redon em posição horizontal e conectar um frasco ou bolsa para drenagem;
11. Recomenda-se drenar com aspiração suave para manter baixa a perda de sangue.

---

### *Composição*

---

Componentes e materiais empregados:

- Dreno Redon com orifícios dispostos em 2 linhas, proporcionando uma imagem longitudinal opaca quando submetido ao Raio-X / Poliuretano com impregnação em tungstênio.
- Fio de extirpação de alta flexibilidade e resistência com sonda guia para a localização externa do mesmo / Aço inoxidável.
- Cabeça de extirpação com diversos diâmetros / Resina ABS.
- Cabeça em T para um manuseio seguro / Poliamida.

---

### *Condições de Armazenamento*

---

- Proteger o produto da ação direta da luz.

---

### *Condições para o Transporte*

---

- Transportar o produto com cuidados necessários de forma a manter sua integridade.

---

### *Condições de Manipulação*

---

- Previamente à operação, deve-se efetuar uma flebografia a fim de assegurar que as veias profundas estejam livres. Em casos de não se comprovar o refluxo pelas veias profundas, a extirpação da veia safena interna é contraindicada.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação;

## Instruções de Uso

### VENOSTRIP® - Flebo-Extrator – Modelo: 5523184

---

#### *Advertências / Precauções*

---

- Não se deve proceder à extirpação venosa havendo sinais de inflamação.
  - Devem ser observados os valores de coagulação exigidos normalmente em intervenções cirúrgicas.
  - Não utilizar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo;
  - O produto deve ser utilizado uma única vez, não sendo permitido em hipótese algum seu reaproveitamento ou reesterilização.
  - O produto deve ser descartado imediatamente após o uso.
- 

#### *Esterilização*

---

- Produto Estéril por Óxido de Etileno
  - Validade: 5 anos
  - Proibido Reprocessar
- 

#### *Contraindicações*

---

- As varizes não devem ser extirpadas durante processos de inflamação aguda. Observar os valores de coagulação normalmente requeridos para a cirurgia. Antes da cirurgia, mediante uma flebografia, deve ser assegurado que as veias profundas estão livres. Se não houver nenhuma prova do refluxo através das veias profundas, como por exemplo, no caso de uma síndrome pós-trombótica, está contraindicada a extirpação da veia safena interna.
- 

#### *Efeitos Adversos*

---

- Hematomas na região da veia extirpada.
- 

#### *Formas de apresentação comercial*

---

**Instruções de Uso****VENOSTRIP® - Flebo-Extrator – Modelo: 5523184**

---

- Embalagem primária (unitária): Embalagem blister.
- Embalagem secundária: caixa de papelão contendo 10 unidades.

**Fabricado por:**

AESULAP AG  
Am Aesculap Platz  
D-78532-Tuttlingen - Alemanha

**Importado e Distribuído por:**

Laboratórios B. Braun S/A  
Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09 -  
Arsenal  
São Gonçalo – RJ Cep 24751-000  
CNPJ: 31.673.254/0001-02  
Resp. Téc.: Sônia M. Q. de Azevedo CRF-RJ 4260  
Registro ANVISA nº: 10008530022  
SAC: 0800 0227286